

DrugWipe®

Solutions de dépistage de drogues

Disponible chez :



Alcohol Countermeasure Systems

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

+1 416 619 3500

acs-corp.com
drugwipe.ca

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS et « Molly » sont des marques commerciales de Alcohol Countermeasure Systems (International), Inc. et sont utilisées sous licence.

DrugWipe et WipeAlyser sont des marques commerciales de Securetec Detektions-Systeme AG et sont utilisées sous licence



20181217

Simple à utiliser, détection précise

Assurer la sécurité de vos employés, effectuer un test de sobriété sur la route, utiliser dans une situation d'urgence, les produits de dépistage de drogue DrugWipe sont conçus pour donner des résultats efficaces.

Comment cela fonctionne ?

Le test prend effet dès qu'un échantillon de salive est donné et que l'ampoule de verre intégrée se brise et que le liquide est libéré.

Grâce à l'écoulement de liquide, les molécules de drogues fixées sur la bande réactive qui contient des anticorps migrent vers la ligne de test. Une coloration rouge de la ligne de test apparaît sur la fenêtre de lecture pour indiquer que le test est positif à la substance correspondante.

Quelles substances peuvent être détectées ?

Ces tests permettent de détecter une variété de drogues comprenant :

- Cannabis (THC/marijuana/haschich)
- Amphétamines
- Méthamphétamines (MDMA/ecstasy)
- Cocaine (crack)
- Opiacés (héroïne/morphine/kétamine)

Pourquoi utiliser un test DrugWipe ?

Les tests de dépistage de drogues DrugWipe sont simples à utiliser et assez petits pour tenir dans votre poche. Très peu d'attente, ces testeurs prendront moins de 10 minutes. Les tests DrugWipe ont des résultats précis supérieurs à 95 %.



DrugWipe® S Test salivaire de dépistage de drogues

Une méthode de prélèvement plus sanitaire par rapport aux tests de sang et d'urine. Le DrugWipe S nécessite le volume d'échantillon le plus minimal dans l'industrie, le rendant idéal pour la précision supérieure.

DrugWipe® Canada Test salivaire de dépistage de drogues

Un système approuvé de collecte de fluide oral permettant de déterminer la présence de cannabis lors de contrôles routiers en bord de route. Le DrugWipe est le système avec le volume d'échantillonnage le plus faible, et les résultats sont affichés en quelques minutes sur la bandelette réactive ou en combinaison avec le lecteur WipeAlyser.



DrugWipe® A Test de dépistage de drogues universel

Le DrugWipe A est un test de dépistage couvrant plusieurs méthodes de détection avec ses capacités d'analyse ; la sueur, la salive, les surfaces – il peut tester toutes ces données ! Ce test de dépistage est bien adapté pour les situations où l'erreur n'est pas une option.

WipeAlyser® Dispositif d'analyse de test (pour le DrugWipe S uniquement)

WipeAlyser est facilement contrôlable avec l'écran tactile intégré. Les entrées de données peuvent être effectuées avec un doigt ou avec le stylet fourni. Pour le fonctionnement de l'appareil, vous serez guidé étape par étape.

Après avoir inséré la cartouche de test prête à l'emploi dans l'appareil, une analyse et des résultats fiables sont transmis électroniquement en quelques secondes.

