

DrugWipe®

Detector de Drogas



Disponible a través de:



Alcohol Countermeasure Systems

acs-latam.net

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS y "Molly" son marcas comerciales de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. y se usan bajo licencia.

DrugWipe y WipeAlyser son marcas comerciales de Securetec Detektions-Systeme AG y se usan bajo licencia.

20190429

Fácil de usar, preciso en la detección

Ya sea para garantizar la seguridad de sus empleados, para realizar una prueba de sobriedad en carretera o una prueba en una situación de emergencia, la gama de detectores de drogas DrugWipe está diseñada para obtener resultados.

¿Cómo funciona?

La prueba se inicia tan pronto como se da una muestra de saliva y la ampolla se rompe, liberando el líquido. El líquido ayuda a que las partículas de la droga que están ligadas a los anticuerpos en la banda de prueba se desplacen a la línea de análisis. Una secuencia de líneas rojas aparece en la ventana de lectura por cada sustancia resultante en una prueba positiva.

¿Qué drogas pueden detectar estos detectores?

Estos controles de droga pueden detectar diferentes drogas, incluyendo:

- Cannabis (THC/marihuana/hachís)
- Anfetaminas
- Metanfetaminas (MDMA/éxtasis)
- Cocaína (crack)
- Opiáceos (heroína/morfina/ketamina)

¿Por qué utilizar un detector DrugWipe?

Los detectores DrugWipe son simples de usar y lo suficientemente pequeños como para caber en el bolsillo. Ya no hay que invertir tiempo esperando para obtener resultados: estos detectores tardan menos de 10 minutos. Los detectores DrugWipe tienen una precisión de más del 95 % y eliminan cualquier conjetura al interpretar los resultados de la prueba.

DrugWipe® S Detector de drogas en saliva

Un método más higiénico para tomar muestras en comparación con los análisis de sangre y orina. DrugWipe S requiere la mínima cantidad de muestras en la industria, por lo que es ideal para obtener la máxima precisión.



DrugWipe® A Detector de drogas universal

DrugWipe A es multifuncional y permite realizar pruebas de: sudor, saliva, superficies, ¡puede realizar pruebas con todas las muestras! Este detector es el más adecuado para cuando no hay lugar para equivocaciones.



WipeAlyser® Dispositivo de Análisis Portátil (solo para DrugWipe S)

Con su pantalla táctil integrada WipeAlyser se controla fácilmente. La entrada de datos puede hacerse con un dedo o con el lápiz suministrado. El operador es guiado a través del funcionamiento del dispositivo paso a paso. Una vez que el cartucho de prueba preparado se inserta en el dispositivo, análisis y resultados confiables se proporcionan en segundos y pueden ser leídos electrónicamente.