

ORALTOX™

Решения для наркологического скрининга

Доступно через:



ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS и "Molly" являются товарными знаками Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. и используются по лицензии.




20170606



Инструкция к применению

Компоненты и подготовка теста

- Важно, чтобы проверяемое лицо не употребляло пищу, напитки, жевательную резинку и др. продукты за 10 минут до начала тестирования
- Предоставьте проверяемому лицу новую нераспечатанную упаковку тампонов
- Проинструктируйте проверяемое лицо удалить пластиковую обертку открыв упаковку и отобрать пробу слюны из ротовой полости

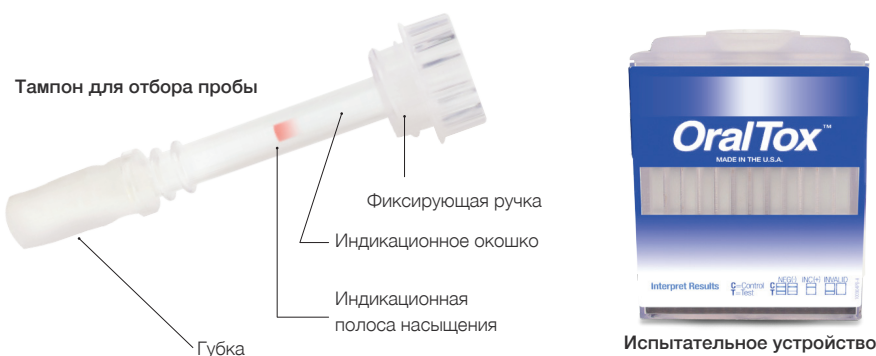


АЛК	Алкоголь > 0.02% ВАС
АМФ	Амфетамин 50 нг/мл
БАРБ	Барбитураты 50 нг/мл
БУП	Бупренорфин 5 нг/мл
БЗО	Бензодиазепинов 10 нг/мл
КОК	Кокаин 20 нг/мл
КОТ	Котинин 50 нг/мл
ЭДДП	Метадона метаболит 20 нг/мл

КЕТ	Кетамин 50 ng/mL
МЕТ	Метамфетамин 50 нг/мл
МТД	Метадон 30 нг/мл
ОПИ	Опиаты 40 нг/мл
ОКСИ	Оксикодон 20 нг/мл
ФЕН	Фенциклидин 10 нг/мл
ППКС	Пропоксифен 50 нг/мл
ТГК	Марижуана 50 нг/мл (родоначалное соединение)

1 Отбор пробы

Проинструктируйте проверяемое лицо поместить тампон из нововскрытой упаковки в ротовую полость и активно протереть поверхность языка, а также между щеками и по поверхности дёсен.

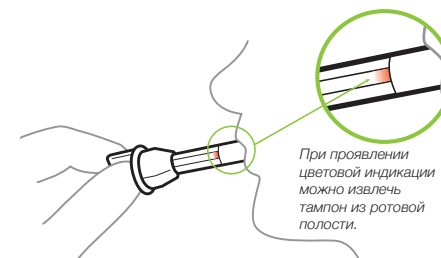

Удерживайте ватный тампон в закрытом рте пока цвет на индикаторной полоске насыщения не появится в индикаторном окошке ватного тампона или до истечения 4 минут.

2 Активация теста

Расположите тестирующее устройство в вертикальном положении на **плоской поверхности** (устройство должно оставаться в этом положении до завершения проверки) и проинструктируйте проверяемое лицо извлечь ватный тампон из ротовой полости


Вставьте конец тампона с губкой в скрининговое устройство, нажав и повернув до тех пор, пока резьбовая ручка не зафиксируется в верхней части устройства

3 Интерпретация результатов

- Негативный, незавершённый или недействительный тест
- Негативные результаты могут быть считаны в течение 2 минут
- Незавершённый результат можно считать 10 минут
- Не считать результаты тестирования после 15 минут
- По завершении тампон следует выбросить

C = контроль

T = тест

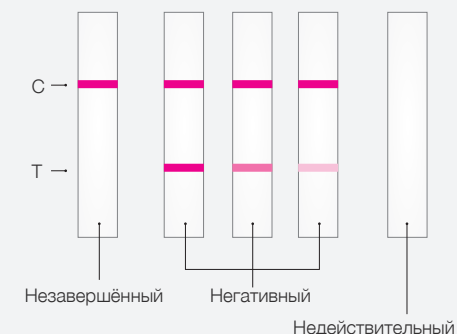

Действительный тест

Самая верхняя линия в тестирующей области помечается как **Тест Действителен**.

Перед считыванием результата убедитесь, что проявились все линии с пометкой **Тест Действителен**. В противном случае выполнение проверки является **недействительным**, и результаты тестирования не должны приниматься во внимание

Негативный

Отрицательный результат обозначается красновато-фиолетовой контрольной линией и второй красновато-фиолетовой линией, проявившейся ниже первой для любого конкретного наркотика.

Интенсивность контрольных линий может быть различной. Любая другая линия вне связи с интенсивностью, цветом или размером, линии и указывает на отрицательный результат для данного наркотика.

Незавершённый

(или «неотрицательный»)

Незавершённым считается результат, обозначаемый красновато-фиолетовой контрольной линией при отсутствии во второй линии для любого наркотика.