

ALERTTMJ4X

ÉTHYLOTEST



EN 15964



Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

info@acs-corp.com
acs-corp.com

Alcolock France SAS

Primavera Park
77, Allée Primavera
ZA Pré Mairy
74 370 Pringy, FRANCE

T +33 4 50 19 00 19
F +33 4 50 19 07 67

contact@alcolockfrance.fr
www.alcolockfrance.fr

© 2015 Alcohol Countermeasure Systems

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALERT et "Molly"

sont des marques de commerce d'Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. utilisées sous licence.

L'éthylotestALERT J4X est facile d'utilisation. Il mesure le contenu d'alcool dans l'haleine (BrAC), qui est en corrélation directe avec la concentration d'alcool dans le sang (BrAC). Le résultat est indiqué sur l'écran. Le testeur n'a qu'un seul bouton, ce qui le rend très facile à utiliser.

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

- Avant les tests : Attendre 20 minutes après avoir bu ou mangé et trois minutes après avoir fumé
- Utiliser l'éthylotest à une température ambiante située entre -5 et 40 °C
- Utiliser cet éthylotest uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu

SYMBOLES :	
	Patienter
	Prêt : Prendre un échantillon d'haleine
	Erreur : Reportez-vous au manuel d'instruction pour les étapes de dépannage
	Abandon : Échantillon d'haleine insuffisant
	Alerte température ambiante (comprise entre -5 et 15 °C)
	Indicateur de puissance de la pile : La dernière barre clignote lorsque les piles ont besoin d'être changées

PRENDRE UN ÉCHANTILLON D'HALEINE

1. Insérer un nouvel embout buccal dans l'éthylotest ALERT J4X. Pour garantir des résultats précis, utiliser un embout neuf à chaque fois.
2. Mettre l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton. Attendre que le symbole **PRÊT** apparaisse.
3. Souffler régulièrement et en continu dans l'embout buccal jusqu'à la fin du signal sonore. Une tonalité continue retentit et le porte embout s'allume en vert pour indiquer un débit respiratoire approprié.
4. Arrêter de souffler uniquement lorsque la tonalité se termine. Un déclic se fait entendre, mais continuez de souffler.
5. L'éthylotest analyse l'échantillon d'haleine et affiche les résultats BrAC en quelques secondes.
6. L'appareil s'éteint automatiquement après une période d'inactivité. Pour éteindre manuellement : Appuyer deux fois sur le bouton, rapidement.

REEMPLACEMENT DES PILES

L'éthylotest a besoin 2 piles AA (alcaline ou rechargeable) pour fonctionner. Pour installer de nouvelles piles, mettre l'appareil hors tension et retirer le couvercle de la pile en appuyant sur le bouton de commande et en faisant glisser le couvercle arrière.