

ALERT™ J5

ALCOHOL-ADEMTESTER



Handleiding

Certificaat

De ALERT J5 alcoholtester en andere alcohol testproducten van Alcohol Countermeasure Systems (ACS) voldoen aan de internationale normen voor de werking en veiligheid. Voor meer details, neem contact op met ACS.



Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T +1 416 619 3500

F +1 416 619 3501

info@acs-corp.com

acs-corp.com

ALCOLOCK France SAS

Primavera Park
77, Allée Primavera

ZA Pré Mairy
CS 10033

74 371 PRINGY Cedex
FRANCE

T +33 4 50 19 00 19

F +33 4 50 19 07 67

contact@alcolockfrance.fr

alcolockfrance.fr


ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALERT en de **"Molly"** zijn handelsmerken van Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. en worden gebruikt onder licentie. Alcohol Countermeasure Systems is de handelsstijl van Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

© 2014 Alcohol Countermeasure Systems


De informatie opgenomen in dit document is de waardevolle eigendom van Alcohol Countermeasure Systems en alle auteursrechten en andere eigendomsrechten op dit document zijn voorbehouden. Geen enkele reproductie van dit document is toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcohol Countermeasure Systems.

ALERT J5-ONDERDELEN


VOORAANZICHT

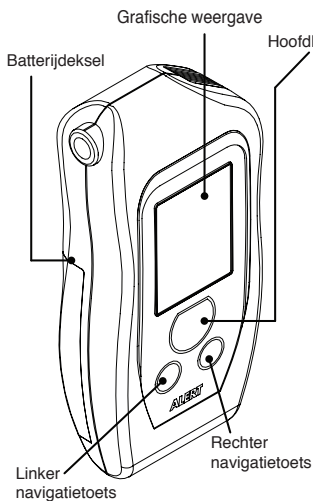


ACHTERAANZICHT

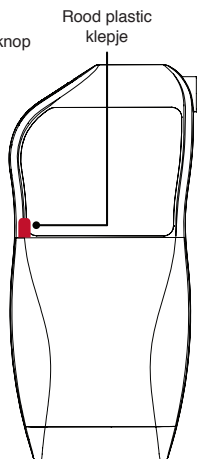

BOVENAANZICHT

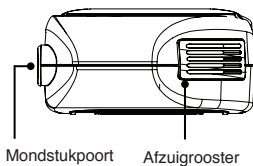

ONDERAANZICHT

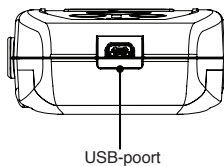

INHOUDSOPGAVE

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen	1
Afstand van aansprakelijkheid	2
Inleiding	2
Garantie	2
Onderhoud	2
Aan de slag gaan	3
Werking	3
Display	4
Menupictogrammen — hoofdmenu	5
Ademtest	5
Passieve test	6
Betekenis van de resultaten van een ademtest	7
Logmenu	8
Instellingenmenu	9
Problemen oplossen	14
Diagnostische gegevens	14
Geavanceerd	15
Batterijsterkte-indicator	15
Afdrukken	16
Afdrukken via bluetooth	16
Printen via USB-kabel	16
Afdrukbewekingen	16
De batterij plaatsen	17
Papierrol plaatsen	17
Onderhoud en probleemoplossing	18
Ijking	18
Afstand doen van op het einde van de levensduur	18
Vervangingsonderdelen	18
Index	19

VEILIGHEID EN VOORZORGSMATREGELEN

- Gebruik de ALERT J5 tester enkel waarvoor het bedoeld is
- Blaas geen rook of spuw niet in het mondstuk, dit kan de sensor beschadigen
- Gebruik altijd een proper mondstuk om in de tester te blazen
- Bedek het afzuigrooster niet (rechter bovenkant van de tester) tijdens de ademtest
- Bewaar de tester niet bij extreme hitte of koude en vermijd blootstelling aan direct zonlicht voor langere tijd
- Gebruik de tester in een omgevingstemperatuur van -20 tot 65 °C
- Gebruik de adapter voorzien voor omgevingstemperaturen lager dan 10 °C
- Gebruik alleen AA-alkalinebatterijen
- Schakel de tester uit alvorens de batterijen te verwijderen
- Demonteer de tester niet, dit kan verwondingen veroorzaken en de garantie nietig verklaren
- Houd magneten of radiofrequentie (RF)-apparaten uit de buurt van de tester om de kans op elektromagnetische interferentie te minimaliseren
- Wacht 10 minuten na het eten, drinken of roken voor het verstrekken van een ademtest
- Het drinken van alcohol en het eten van voedingsmiddelen met alcohol zal resulteren in een waarschuwing, zoals: medicijnen, muntjes, roken, het gebruik van mondwater of mondspray
- Spoel uw mond met water na het gebruiken van mondwater of mondspray om alcohol te verwijderen
- Spuit geen luchtverfrissers, desinfecterende middelen, cologne of parfum voor de test, deze kunnen ook alcohol bevatten

OPMERKING: Er bestaan bijkomende factoren die de resultaten van een ademtest kunnen beïnvloeden. Volg deze handleiding zorgvuldig om foutieve resultaten te voorkomen.

AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

De verkoop van de ALERT J5 alcoholtester gebeurt onder de strikte voorwaarde dat noch de producent noch de verkoper van het apparaat verantwoordelijk wordt gesteld voor de juistheid van een ademtest noch voor verlies, schade, verwondingen of ander gevolg resulterend - direct of indirect - uit het gebruik daarvan.

INLEIDING

Dank u voor de aankoop van de ALERT J5 alcoholtester, een apparaat ontworpen voor de sectoren industrie en verkeersveiligheid.

De ALERT J5 tester meet nauwkeurig het ademalcoholgehalte (AAG).

Alcoholtolerantie verschilt van persoon tot persoon, verzwakking kan optreden onder de wettelijke limiet. Het kan tot 60 minuten duren na de consumptie van alcohol voordat het hoogste AAG wordt bereikt.

GARANTIE

Alle ACS-producten zijn gegarandeerd vrij van defecten in vakmanschap en materialen voor één jaar vanaf de datum van verzending.

ACS gaat akkoord met het vervangen of herstellen van elk defect ALERT J5-apparaat, mits het defect niet werd veroorzaakt door verkeerd gebruik of verkeerde behandeling.

Elk ALERT J5-apparaat dat wordt teruggekeerd voor reparatie onder garantie dient goed verpakt en voldoende gefrankeerd teruggestuurd te worden naar het erkende verkoopbedrijf.

ONDERHOUD

De ALERT J5 alcoholtester is vervaardigd voor veldgebruik en is onderhevig aan vuil en puin. Reinig met een vochtige doek en milde zeep. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen.

Periodiek onderhoud en ijking is vereist. Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie.

AAN DE SLAG GAAN

De ALERT J5 alcoholtester is gemakkelijk te gebruiken. Het meet het ademalcoholgehalte (AAG) dat in directe verhouding is met het bloedalcoholgehalte (BAG). Het resultaat wordt afgelezen op het display.

De ALERT J5 tester is zeer geschikt voor de industriële en verkeersveiligheidssectoren, met drie-knop controle en de keuze tussen werking op batterij of stroomadapter.

OPMERKING: Een rood plastic klepje wordt ingevoegd tussen de batterij en de elektrische aansluiting om de batterij te sparen tijdens de verzending en opslag. Voor het eerste gebruik van de tester, verwijder het klepje uit het batterijvak, dat toegankelijk is aan de achterkant van de tester. Om het klepje te verwijderen, hoeft u de achterkant niet te openen.

WERKING

DE TESTER INSCHAKELLEN

Druk één keer op de *hoofdknop* om de ALERT J5 tester IN te schakelen. Het ACS-logo wordt weergegeven tijdens de opstartprocedure.

KLAAR VOOR EEN ADEMTEST


KLAAR verschijnt op het display als de ALERT J5 tester klaar is voor gebruik.

DE TESTER UITSCHAKELLEN

De ALERT J5 alcoholtester schakelt automatisch uit na 3 minuten van inactiviteit. Druk en houd de *hoofdknop* ingedrukt of selecteer het pictogram **Uitschakelen** om de ALERT J5 tester uit te schakelen.

DISPLAY

Het display van de ALERT J5 alcoholtester toont het AAG met de meeteenheid, batterijniveaus, datum en uur, foutmeldingen, afbreekberichten en alle indicatoren nodig voor een heldere en begrijpelijke gebruikersinterface.

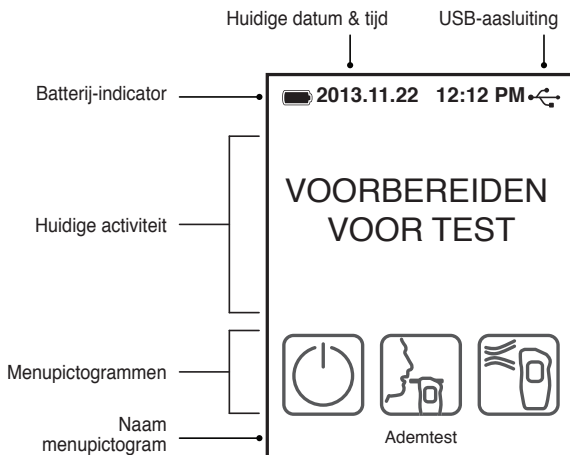

MENUPICTOGRAMMEN — HOOFDMENU

	Ademtest	Een test doen met een mondstuk.
	Passieve test	Een test van de omgeving doen.
	Geschiedenis	Het overzicht bekijken met een afdrukoptie.
	Instellingen	Uur / datum, taal, volume, helderheid en Bluetooth-koppelingen.
	Problemen oplossen	Foutcodes, diagnostiek en geavanceerde opties.
	Uitschakeling	Om het apparaat uit te schakelen.

In het Hoofdmenu, gebruik de navigatietoetsen om naar de gewenste functie te gaan en druk op de *hoofdknop* om te selecteren.

ADEMTEST



Selecteer het pictogram **Ademttest** om een ademtest met mondstuk uit te voeren. Gebruik altijd een proper mondstuk om een nauwkeurige ademtest te garanderen.

VOORBEREIDEN VOOR TEST wordt weergegeven, gevolgd door **KLAAR**.

Blaas in het mondstuk. U hoort een continue toon die een correcte



ademstroom aangeeft. Blijf blazen totdat de toon stopt. Een toonstoring met weergave van **AFBREKEN** geeft aan dat geen correcte ademtest werd verschaft. Volg de aanwijzingen op het scherm voor het uitvoeren van een nieuwe test.

AAN HET ANALYSEREN wordt op het display weergegeven gedurende enkele seconden, gevolgd door het numerieke AAG-resultaat en het **Printen** pictogram. De mondstukpoort licht ook op:

- ROOD - als het testresultaat de faaldrempel overschrijdt
- ORANJE - als het testresultaat binnen het waarschuwbereik is
- GROEN - als het testresultaat lager is dan de waarschuwbereik

Druk op de *hoofdknop* om het pictogram **Printen** te selecteren, of wacht tot het apparaat terug overgaat op **KLAAR**. Raadpleeg de rubriek “Afdrukken” in deze handleiding voor afdruk-instructies.

Het resultaat wordt opgeslagen in de log. Raadpleeg de rubriek “Logmenu” in deze handleiding voor verdere informatie.

PASSIEVE TEST



Selecteer het pictogram **Passieve test** om een ademtest zonder mondstuk uit te voeren.

VOORBEREIDEN VOOR TEST wordt weergegeven, gevolgd door **KLAAR**.



Plaats uw mond op 3 cm van het afzuigrooster, adem gedurende 5 seconden uit en druk op de *hoofdknop* om een ademtest te nemen.

OPMERKING: *De passieve test wordt in het algemeen gebruikt om de aanwezigheid van alcohol in de omgeving te detecteren.*

AAN HET ANALYSEREN wordt gedurende enkele seconden weergegeven op het scherm, gevolgd door **DOORSTAAN**, **WAARSCHUWING** of **MISLUKT** en het **Printen** pictogram.

De mondstukpoort licht op:

- **ROOD** - als het testresultaat de faaldrempel overschrijdt
- **ORANJE** - als het testresultaat binnen het waarschuwbereik is
- **GROEN** - als het testresultaat lager is dan de waarschuwsdrempel

Druk op de *hoofdknop* om het pictogram **Printen** te selecteren, of wacht tot het apparaat terug overgaat op **KLAAR**. Raadpleeg de rubriek “Afdrukken” in deze handleiding voor afdrukinstructies.

Het resultaat wordt opgeslagen in de log. Raadpleeg de rubriek “Logmenu” in deze handleiding voor verdere informatie.

BETEKENIS VAN DE RESULTATEN VAN EEN ADEMTEST

De resultaten van een ademtest worden digitaal weergegeven en kunnen geïnterpreteerd worden in de onderstaande tabel; AAG wordt uitgedrukt in mg/L:

AAG (mg/L)	BETEKENIS
0.05	Niet in verband met een positieve alcoholmeting.
0.10	Niet noodzakelijk indicatief voor alcoholgebruik.
0.25	Positieve alcoholmeting en onveilig om een voertuig te besturen.
0.40	Hoog alcoholgehalte gedetecteerd en gevaarlijk om een voertuig te besturen.

Een AAG-resultaat tot 0,05 mg/L kan voortkomen uit de in het lichaam natuurlijk aanwezige stoffen en wordt niet geassocieerd met een positieve alcoholmeting.

Resultaten tot 0,10 mg/L kunnen voorkomen door alcoholbesmetting van voeding, dranken of medicijnen en zijn niet noodzakelijk indicatief voor alcoholgebruik.

Resultaten van 0,25 mg/L en meer zijn een indicatie van alcoholgebruik en onveilig voor het besturen van een voertuig, het resultaat kan leiden tot een verkeersovertreding.

Resultaten van 0,40 mg/L en meer zijn een indicatie van hoge niveaus van alcoholgebruik en te gevaarlijk voor het besturen van een voertuig, het resultaat kan leiden tot een strafbaar feit.

LOGMENU



Selecteer het **Geschiedenis** pictogram om de resultaten opgeslagen in de log te bekijken.

Elke ademtest wordt opgeslagen in een numeriek formaat dat als volgt kan worden geïnterpreteerd:

Datum Uur

2013.11.22 **10:05 AM**

► 13.06.04 11:35 AM Passieve Doorstaan
13.06.04 11:35 AM Passieve Doorstaan
13.06.04 11:34 AM Passieve Doorstaan
13.06.04 08:54 AM Passieve Doorstaan
13.06.04 08:53 AM Passieve Doorstaan
13.06.04 03:40 PM 0.00 mg/dL
13.06.04 03:31 PM 0.00 mg/dL
13.06.04 02:46 PM Passieve Doorstaan
13.06.04 02:45 PM Passieve Mislukt
13.06.04 02:44 PM Passieve Doorstaan

Terug

Het testresultaat (uitgedrukt als **Doorstaan**, **Waarschuwing**, of **Mislukt** voor een passieve test)

OPMERKING: *Verslagen in het geel geven aan dat de test werd uitgevoerd met een apparaat waarvan de ijking verlopen is. Niet-gecontroleerd wordt weergegeven op de afdruk.*

Volg onderstaande pictogrammen om te navigeren door het Logmenu.

U kunt door de opties scrollen met behulp van de navigatietoetsen en selecteren met de *hoofdknop*. De huidige selectie wordt weergegeven door een pijl ► aan de linkerkant van het scherm.

	Terug	Om terug te keren naar het vorige menu.
	Printen	Raadpleeg de rubriek "Afdrukken" in deze handleiding.
	Pagina omhoog	Om in de log omhoog te gaan, 1 pagina per keer.
	Pagina omlaag	Om in de log omlaag te gaan, 1 pagina per keer.
	Verslag omhoog	Om in de log omhoog te gaan, 1 verslag per keer.
	Verslag omlaag	Om in de log omlaag te gaan, 1 verslag per keer.

INSTELLINGENMENU



Selecteer het pictogram **Instellingen** om verschillende opties te wijzigen.

DATUM & TIJD



Selecteer het pictogram **Datum & tijd** om de verschillende tijdselementen te wijzigen. Scrol door de opties met behulp van de navigatietoetsen en selecteer met de *hoofdknop*.



Tijd aanpassen. De tijd, **24-uursysteem** en **TERUG** opties zijn aanwezig. De huidige optie wordt aangegeven door een pijl ►. Druk op de navigatietoetsen om omhoog en omlaag te scrollen en op de *hoofdknop* om te selecteren.

Tijd. De uurwaarde knippert. Gebruik de navigatietoetsen om de waarde te verhogen en verlagen. Druk de *hoofdknop* om te bevestigen en over te gaan op de minuutwaarde. Herhaal deze stappen om de minuutwaarde aan te passen en te bevestigen, daarna keert u terug naar het vorige menu.

Tijdsysteem. Het tijdsysteem knippert. Schakel tussen het **12-uur** en **24-uursysteem** met de navigatietoetsen en druk op de *hoofdknop* om te bevestigen. De **AM/PM**-waarde knippert als het **12-uursysteem** wordt geselecteerd. Schakel tussen de **AM** en **PM**-waarde met de navigatietoetsen en druk op de *hoofdknop* om te bevestigen. Selecteer **TERUG** door op de *hoofdknop* te drukken om terug te keren naar het menu Tijd en Datum.



Datum aanpassen. De dag, maand, jaar en **TERUG** opties zijn aanwezig. De huidige optie wordt aangegeven door een pijl ►. Druk op de navigatietoetsen om omhoog en omlaag te scrollen en op de *hoofdknop* om te selecteren.

Dag. De dagwaarde knippert. Gebruik de navigatietoetsen om de waarde te verhogen en verlagen. Druk op de *hoofdknop* om te bevestigen.

Maand. De maandwaarde knippert. Gebruik de navigatietoetsen om de waarde te verhogen en verlagen. Druk op de *hoofdknop* om te bevestigen.

Jaar. De jaarwaarde knippert. Gebruik de navigatietoetsen om de waarde te verhogen en verlagen. Druk op de *hoofdknop* om te bevestigen.

Indeling. Het datumformaat knippert. Gebruik de navigatietoetsen om te wijzigen hoe het datumformaat wordt weergegeven. Druk op de *hoofdknop* om te bevestigen.



Terug. Om terug te keren naar het menu Instellingen.

VOLUME



Selecteer het pictogram **Volume** om de verschillende volume-elementen van de luidspreker te wijzigen. Scrol door de opties met behulp van de navigatietoetsen en selecteer met de *hoofdknop*.



Geluidsknop. Een pieptoon wordt standaard gegenereerd voor elke druk op de knop. Druk op de hoofdknop om te scrollen tussen **Knop dempen aan** en **Knop dempen uit**.



Volume omhoog. Druk op de hoofdknop om het volume te verhogen.



Volume omlaag. Druk op de hoofdknop om het volume te verlagen.



Terug. Om terug te keren naar het menu Instellingen.

HELDERHEID



Selecteer het pictogram **Helderheid** om het scherm lichter of donkerder te maken. Scrol door de opties met behulp van de navigatietoetsen en selecteer met de *hoofdknop*.



Druk op de *hoofdknop* om de helderheid te verhogen.



Om terug te keren naar het menu Instellingen.



Terug. Allows you to move back to the Instellingenmenu.

TAAL



Druk op de navigatietoetsen om omhoog en omlaag te scrollen tussen de talen en druk op de *hoofdknop* om te selecteren en te bewaren. Het scherm keert terug naar het menu Instellingen.

APPARAATINSTELLINGEN



Het huidige item wordt aangegeven door een pijl ►. Gebruik de navigatietoetsen om door de items te scrollen. Dit menu is enkel ter informatie en is nuttig wanneer u contact opneemt met een erkend verkoper voor het oplossen van problemen. Het biedt een lijst van fabrieksinstellingen:

- Landcode
- Print script versie
- Firmware versie
- Hardware versie
- PCB-serienummer
- Apparaat-serienummer
- Meeteenheid
- Waarschuwinglimiet
- Faallimiet

Druk te allen tijde op de *hoofdknop* om terug te gaan naar het Hoofdmenu.

KOPPELING BLUETOOTH



Met deze rubriek kunt u de ALERT J5 tester koppelen aan de Bluetooth printer. Raadpleeg de rubriek “Afdrukken” in deze handleiding voor meer informatie.

INSTELLINGEN HERSTELLEN



Druk op de *hoofdknop* om het Volume, Helderheid en Taal terug te zetten op de bedrijfsinstellingen.

PROBLEMEN OPLOSSEN



Diagnostieken, geavanceerde en terugopties zijn aanwezig. De huidige optie wordt aangegeven door een pijl ►. Druk op de navigatietoetsen om omhoog en omlaag te scrollen en op de *hoofdknop* om te selecteren.

DIAGNOSTISCHE GEGEVENS

Test de hoofdonderdelen van het apparaat. De huidige optie wordt aangegeven door een pijl ►. Druk op de navigatietoetsen om door de pictogrammen aan de onderkant te scrollen en op de *hoofdknop* om te selecteren.

POMP. De pomp wordt geactiveerd zodra de laadspanning wordt bereikt. Het resultaat van de test wordt aangegeven als **DOORSTAAN** of **MISLUKT**. Druk op de *hoofdknop* om terug te gaan naar het vorig menu.

LED. De LED van de mondstukpoort wordt getest in alle beschikbare kleuren (Groen, Oranje en Rood) om een visuele controle mogelijk te maken. Het resultaat van de test wordt aangegeven als **DOORSTAAN** of **MISLUKT**. Druk op de *hoofdknop* om terug te gaan naar het vorig menu.

SPEAKER. De luidspreker wordt getest met alle geïmplementeerde tonen. Het resultaat van de test wordt aangegeven als **DOORSTAAN** of **MISLUKT**. Druk op de *hoofdknop* om terug te gaan naar het vorig menu.

BLUETOOTH. De Bluetooth-module wordt getest. Het resultaat van de test wordt aangegeven als **DOORSTAAN** of **MISLUKT**. Druk op de *hoofdknop* om terug te gaan naar het vorig menu.

SENSORVERWARMER. De sensorverwarmer wordt getest op de mogelijkheid om een gewenste temperatuur in 20 seconden te bereiken. Het resultaat van de test wordt aangegeven als **DOORSTAAN** of **MISLUKT**. Druk op de *hoofdknop* om terug te gaan naar het vorig menu.

OPMERKING: Een energie-adapter moet aangesloten worden op het apparaat om de sensorverwarmer te kunnen testen.

BLAASBUIISVERWARMER. De blaasbuisverwarmer wordt getest op de mogelijkheid om een gewenste temperatuur in 20 seconden te bereiken het resultaat van de test wordt aangegeven als **DOORSTAAN** of **MISLUKT**. Druk op de *hoofdknop* om terug te gaan naar het vorig menu.

OPMERKING: *Een energie-adapter moet aangesloten worden op het apparaat om de blaasbuisverwarmer te kunnen testen.*

APPARAATTEMPERATUUR. De temperatuur gemeten door de omgevingssensor en blaasbuis thermistors wordt weergegeven ter indicatie van mogelijke anomalieën met deze onderdelen.

ANALOGIE SIGNALLEN. De analoge signalen voor batterijspanning, realtimeklok, versterker, CVE en pomp worden weergegeven ter indicatie van mogelijke anomalieën met deze onderdelen.

GEAVANCEERD

Dit menu is beveiligd met een wachtwoord, enkel een bevoegd ACS-persoon kan deze acties uitvoeren.

BATTERIJSTERKTE-INDICATOR

Het pictogram batterijsterkte wordt weergegeven in de linker bovenhoek.

De batterijen dienen vervangen te worden als het pictogram batterijsterkte knippert. Indien u dit niet doet, kan het apparaat onverwacht uitschakelen.

OPMERKING: *Het pictogram batterijsterkte wordt vervangen door een USB-pictogram als het apparaat aangesloten wordt in een voertuig door middel van een energie-adapter.*

AFDRUKKEN

AFDRUKKEN VIA BLUETOOTH

De voorziene Bluetooth-printer is reeds standaard gekoppeld aan de ALERT J5. Volg deze procedure voor het koppelen van de tester en de printer in het geval dat één van beide dient vervangen te worden.

1. Druk op en houd de startknop ingedrukt tot het batterijlicht oplicht en de printer inschakelt. De batterij dient opgeladen te worden als de printer niet inschakelt.
2. In het Hoofdmenu, ga naar het pictogram **Instellingen** met de navigatietoetsen selecteer het pictogram **Koppeling Bluetooth** door op de *hoofdknop* te drukken.
3. Het huidige item wordt aangegeven door een pijl ►. Gebruik de navigatietoetsen om door de items te scrollen. Selecteer **APPARAAT TOEVOEGEN** door op de *hoofdknop* te drukken. Het duurt enkele seconden om de lijst aan te maken.
4. Bluetooth-apparaten binnen een bereik van 10 meter wordt weergegeven. Selecteer de printer met de *hoofdknop* en voer het wachtwoord in (contacteer ACS).

OPMERKING: U dient een printer slechts één keer te koppelen.

PRINTEN VIA USB-KABEL

De USB-printer wordt geleverd met een USB-kabel. Deze kabel verbindt de USB-poort van het apparaat met de USB-poort van de printer. Er zijn geen bijkomende handelingen vereist om ze te verbinden.

AFDRUKBEWEKINGEN

Het **Printen** pictogram verschijnt na het nemen van een ademtest, evenals in het Logmenu om het afdrucken van vroegere resultaten mogelijk te maken.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld voordat u verder gaat.

Druk op de *hoofdknop* om de afdrukmogelijkheden weer te geven: Bluetooth of USB. Schakel tussen de opties door op de navigatietoetsen te drukken en selecteer de optie met de *hoofdknop*. De resultaten worden automatisch afgedrukt na selectie.

Raadpleeg de rubriek “Afdrukken” in deze handleiding voor verdere informatie.


DE BATTERIJ PLAATSEN

1. Til het lipje aan de achterkant van de printer op om de achterklep te verwijderen en het batterijvak vrij te maken.
2. Aligneer de energiepolen en plaats de batterij in het vak.
3. Plaats het deksel terug.

OPMERKING: *Verwijder de batterij als de printer niet wordt gebruikt om de levensduur te behouden. Maak de batterij volledig leeg alvorens ze opnieuw op te laden.*

PAPIERROL PLAATSEN

1. Open het bovendeksel van de printer door beide zijden omhoog te duwen.
2. Plaats een nieuwe papierrol in de houder, met de papierinvoer weg van de knoppen.
3. Sluit het deksel zodat een centimeter papier aan de onderkant uitsteekt.

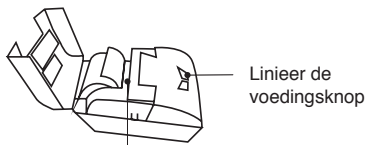

Plaats het papier onder

4. Druk en houd de startknop ingedrukt om de printer in te schakelen. Druk op de voedingsknop totdat het papier vloeiend door de printer gaat.

ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING

IJKING

Jaarlijkse ijking is nodig om optimale nauwkeurigheid van ademtests te behouden. De ALERT J5 alcoholtester geeft automatisch **KALIBRATIE VEREIST** weer in het Hoofdmenu, 14 dagen voordat een ijking dient uitgevoerd te worden. Ijking kan uitgevoerd worden met de ALCOSIM alcoholsimulator of een alcohol gas standaard cilinder.

AFSTAND DOEN VAN OP HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

Afstand doen van de ALERT J5 tester op het einde van de levensduur kan door:

- De tester terug te keren naar de verkoper
- Contact op te nemen met de plaatselijke bevoegdheid van afvalbeleid voor meer informatie over de juiste wijze van verwijdering
- Te vragen aan een geschikt afvalverwerkend bedrijf om de tester weg te doen

VERVANGINGSONDERDELEN

Neem contact op met de verkoper voor onderstaande onderdelen:

95-000145 Mondstukken (zak van 25)

59-200032 Printer papierrol

INDEX

A

Aan het printen, 16
Ademalcoholgehalte (AAG), 4, 7
Ademstroom aangeeft, 5
Ademtest, 2, 5, 6
Afstand doen, 18
Afzuigrooster, 6
Analoge signalen, 15
Apparaatinstellingen, 13
Apparaat-serienummer, 13
Apparaattemperatuur, 15

B

Batterij, 3, 4, 15
Blaasbuisverwarmer, 15
Bloedalcoholgehalte (BAG), 3
Bluetooth, 14, 16

D

Datum & tijd, 9
Diagnostieken, 14

F

Firmware versie, 13
Foutmeldingen, 4

G

Garantie, 2

H

Helderheid, 12
Hoofdmenu, 5

I

Ijking, 2, 9, 18
Instellingen, 9
Instellingen herstellen, 13

K

Knopgeluid, 11

L

Landcode, 13
LED, 14
Logmenu, 8
Luidspreker, 14

M

Mondstuk, 5, 6

O

Onderhoud, 18

P

Pagina omhoog, 9
Pagina omlaag, 9
Passieve test, 6
PCB-serienummer, 13
Pomp, 14
Printen, 6, 7
Probleemoplossing, 18

R

Realtimeklok, 10

S

Sensor, 1
Sensorwarmer, 14

T

Taal, 12
Tijdsysteem, 10

U

Uitschakelen, 3

V

Verslag omhoog, 9
Verslag omlaag, 9
Volume, 11

W

Waarschuwbereik, 6
Wettelijke limiet, 6





