

ALERT™ J5

ÉTHYLOTEST



Manuel d'utilisation

Annonce de la Federal Communications Commission (FCC)

Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Ce dispositif est conforme au chapitre 15 des règles établies par la FCC. Son fonctionnement est soumis aux 2 conditions suivantes :

1. Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Ce dispositif doit supporter toute interférence entrante, y compris les interférences pouvant être la cause d'un fonctionnement non souhaité.

Industry Canada

Ce dispositif est conforme aux normes radioélectriques des appareils dispensés de licence d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
2. Ce dispositif doit supporter toute interférence, y compris les interférences pouvant être la cause d'un fonctionnement non souhaité.

Certification

L'éthylotest ALERT J5 et les autres dispositifs éthylométriques d'Alcohol Countermeasure Systems (ACS) sont conformes aux normes internationales de fonctionnement et de sécurité. Contactez ACS pour obtenir plus de détails.



Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T +1 416 619 3500

F +1 416 619 3501

info@acs-corp.com

acs-corp.com

ALCOLOCK France SAS

Primavera Park
77, Allée Primavera

ZA Pré Mairy
CS 10033

74 371 PRINGY Cedex
FRANCE

T +33 4 50 19 00 19

F +33 4 50 19 07 67

contact@alcolockfrance.fr

alcolockfrance.fr


ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOSIM, ALERT et le « **Molly** » sont des marques déposées de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc., et sont utilisées sous licence. Alcohol Countermeasure Systems est une marque commerciale de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

© 2014 Alcohol Countermeasure Systems


Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Alcohol Countermeasure Systems Corp qui se réserve, comme il se doit, tous droits de propriétés et de copyright sur ce document. Aucune reproduction de ce document n'est autorisée sans le consentement écrit préalable de Alcohol Countermeasure Systems.

COMPOSANTS DE L'ALERT J5


VUE DE FACE

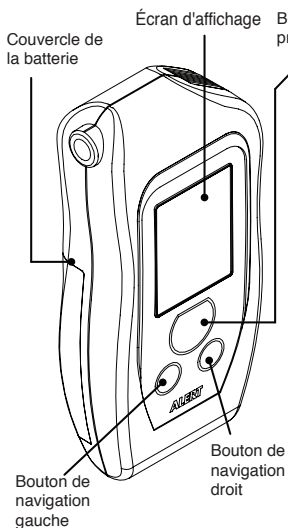

VUE DE L'ARRIÈRE

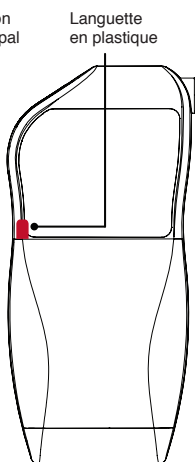

VUE DU DESSUS

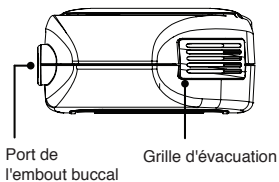

VUE DU DESSOUS

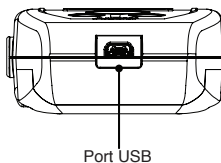


TABLE DES MATIÈRES

Sécurité et précautions	1
Avertissement	2
Introduction	2
Garantie	2
Entretien	3
Mise en route	3
Fonctionnement	3
Écran	4
Icônes du menu — menu principal	5
Test	5
Test passif	6
Menu historique	8
Menu de Réglage	9
Menu Diagnostique	14
Diagnostiques	14
Avancé	15
Témoin de chargement des piles	15
Éteindre l'éthylotest	15
Imprimer	16
Imprimer via bluetooth	16
Imprimer via câble USB	16
Travaux d'impression	17
Insertion de la batterie	17
Placement du rouleau de papier	18
Entretien et dépannage	19
Étalonnage	19
Élimination en fin de vie utile	19
Accessoires et pieces detachees	19
Index	21

SECURITÉ ET PRÉCAUTIONS

- Utilisez l'éthylotest ALERT J5 uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu
- Ne soufflez pas de fumée ou ne crachez pas dans l'embout buccal; cela peut endommager le capteur
- Utilisez toujours un embout buccal propre pour souffler dans l'éthylotest
- Ne recouvrez pas la grille d'échappement (située en haut à droite de l'éthylotest) lors que vous produisez un échantillon d'haleine
- Ne stockez pas l'éthylotest à des températures extrêmes et évitez de l'exposer à la lumière du soleil pour une durée prolongée
- Utilisez l'éthylotest à une température ambiante située entre -20 et 65 °C
- En cas de températures inférieures à 10 °C, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur fourni
- Utilisez des piles alcalines AA uniquement
- Éteignez l'éthylotest avant de retirer les piles
- Ne démontez pas l'éthylotest car cela pourrait causer des blessures et annuler la garantie
- Éloignez les dispositifs magnétiques ou à fréquence radio de l'éthylotest afin de réduire les interférences électromagnétiques potentielles
- Attendez 10 minutes après avoir mangé, bu ou fumé avant de produire un échantillon d'haleine
- Boire de l'alcool ou manger de la nourriture alcoolisée engendrera un avertissement (comme par exemple : médicaments, gouttes de menthol, utilisation de bain ou de vaporisateur de bouche, etc.)
- Rincez-vous la bouche avec de l'eau après utilisation d'un bain ou d'un vaporisateur de bouche pour éliminer les traces d'alcool
- Ne diffusez pas de désodorisants, de désinfectants, d'eau de Cologne ou de parfum avant d'effectuer un test, car ces produits peuvent également contenir de l'alcool

REMARQUE : D'autres facteurs peuvent également influencer les résultats d'un test d'haleine. Suivez les instructions de ce manuel avec attention pour éviter les résultats erronés.

AVERTISSEMENT

La vente de l'éthylotest ALERT J5 est soumise selon les pays aux conditions générales de vente du fabricant, de l'importateur désigné par le fabricant ou distributeur et /ou revendeur autorisé.

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté l'éthylotest ALERT J5, un dispositif conçu pour les secteurs de la prévention du risque routier et le test de contrôle routier par les forces de l'ordre.

L'éthylotest ALERT J5 mesure la concentration d'alcool de l'haleine avec précision.

La tolérance à l'alcool diffère d'une personne à l'autre. Des déficiences peuvent se produire en dessous de la limite légale. La concentration la plus élevée d'alcool dans l'haleine peut prendre 60 minutes après la consommation d'alcool pour se manifester.

GARANTIE

La durée et les conditions de garanties peuvent différer selon le pays. Prière de se référer aux conditions de ventes applicables.

ACS accepte de remplacer ou de réparer tout dispositif ALERT J5 défectueux, à condition que les défauts ne soient pas causés par une utilisation inappropriée ou de mauvaises manipulations.

Tout dispositif ALERT J5 retourné à des fins de réparation dans le cadre de la garantie doit être emballé convenablement et envoyé tous frais de port payés à l'adresse du revendeur agréé.

ENTRETIEN

L'éthylotest ALERT J5 est conçu pour une utilisation sur le terrain et peut être sensible aux saletés et à la poussière selon l'environnement d'utilisation. Nettoyez-le avec un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyeurs ou de solvants abrasifs.

Un entretien et un étalonnage périodique sont obligatoires. Contactez votre revendeur pour obtenir plus d'informations.

MISE EN ROUTE

L'éthylotest ALERT J5 est facile à utiliser. Il mesure la concentration d'alcool dans l'haleine qui est directement proportionnelle à la concentration d'alcool dans le sang. Le résultat est indiqué sur l'écran.

L'éthylotest ALERT J5 convient parfaitement dans les secteurs de la prévention du risque routier et le test de contrôle routier par les forces de l'ordre. Il comporte trois boutons de contrôle et peut être utilisé avec piles ou adaptateur secteur.

REMARQUE : Une languette est insérée entre les piles et les raccordements électriques afin de conserver la charge électrique pendant le transport et le stockage. Tirez sur la languette de plastique placée sur le compartiment des piles à l'arrière de l'éthylotest avant de l'utiliser pour la première fois. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le couvercle arrière pour retirer la languette.

FONCTIONNEMENT

ALLUMAGE DE L'ETHYLOTEST


Appuyez (2 secondes) sur le bouton *principal* pour ALLUMER l'éthylotest ALERT J5. Le logo d'ACS s'affiche au cours de la séquence de démarrage.

PRÉPARATION POUR UN TEST

La mention **PRÊT POUR TEST** s'affiche à l'écran lorsque l'éthylotest ALERT J5 est prêt à être utilisé.

ÉCRAN

L'écran de l'éthylotest ALERT J5 affiche la concentration d'alcool dans l'haleine ainsi que l'unité de mesure, le niveau de chargement des piles, les messages d'erreur et toutes autres indications nécessaires à une interface utilisateur claire et complète.

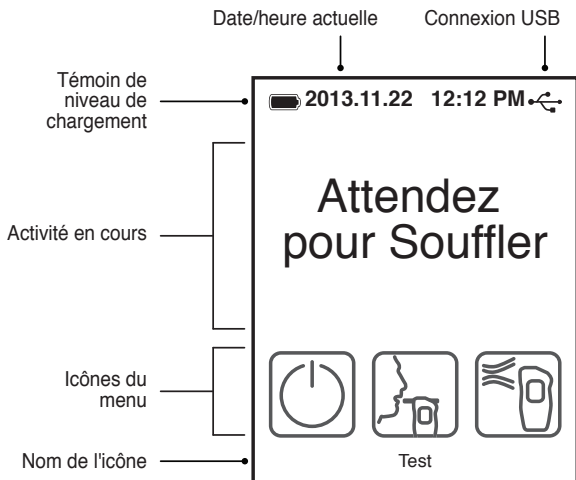

ICÔNES DU MENU — MENU PRINCIPAL

	Test	Effectuer un test avec un embout buccal.
	Test passif	Pour effectuer un test sur le milieu environnant.
	Historique	Pour examiner le journal avec possibilité d'impression.
	Réglage	Heure/date, langue, volume, luminosité et appairage Bluetooth.
	Diagnostic	Codes d'erreur, diagnostics et options avancées.
	Éteindre	Éteindre l'unité.

Dans le menu principal, sélectionnez la fonction souhaitée en utilisant les boutons de navigation, puis appuyer sur le bouton *principal* pour confirmer la sélection.

TEST

Sélectionnez l'icône **Test** pour procéder à un test d'alcoolémie à l'aide de l'embout buccal. Installez toujours un embout buccal propre afin d'assurer la précision de l'échantillon d'haleine.

La mention **Attendez pour Souffler** s'affiche, suivie de la mention **PRÊT POUR TEST**.

Soufflez dans l'embout buccal. Si un signal sonore retentit en continu, cela indique que le débit d'air soufflé convient. Continuez de souffler jusqu'à la fin du signal sonore (5 secondes). Un signal sonore d'échec retentit et la mention **ANNULE** s'affiche, indiquant que l'échantillon d'haleine produit est inadéquat. Pour effectuer un nouveau test, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran.



La mention **ANALYSE** s'affiche pendant quelques secondes, suivie du résultat numérique de l'analyse de la concentration d'alcool dans l'haleine et de l'apparition de l'icône **IMPRIMER** sur l'écran. Le port de l'embout buccal s'illumine également :

- ROUGE - lorsque le résultat du test dépasse le taux d'alcoolémie légal
- ORANGE - lorsque le résultat du test se trouve compris dans une fourchette d'avertissement
- VERT - lorsque le résultat du test est en dessous du seuil d'avertissement

Appuyez sur le bouton principal pour sélectionner l'icône **IMPRIMER**, ou attendez que le dispositif soit de nouveau en position **PRÊT POUR TEST**. Reportez-vous à la section « Imprimer » de ce manuel pour consulter les instructions d'impression.

Le résultat est conservé dans le journal. Reportez-vous à la section « Menu Historique » de ce manuel pour obtenir plus d'informations.

TEST PASSIF



Sélectionnez l'icône **Test passif** pour procéder à un test d'alcoolémie sans utiliser l'embout buccal.

La mention **Attendez pour Souffler** s'affiche, suivie de la mention **PRÊT POUR TEST**.



Pour prendre un échantillon d'haleine, positionnez votre bouche à 3 cm de la grille d'échappement, soufflez pendant 5 secondes et appuyez sur le bouton *principal*.

REMARQUE : Les tests passifs sont en général utilisés pour détecter la présence d'alcool dans l'environnement ambiant. En cas de difficulté de souffle, le test passif peut être utilisé par les forces de l'ordre. Ce test indique uniquement la présence ou l'absence de traces d'alcool dans les voies respiratoires. Cela permet de lever le doute sur l'état de l'usager et de prendre la décision sûre de poursuivre ou non le contrôle par un mesurage légal.

La mention **ANALYSE** s'affiche pendant quelques secondes, suivie du message **TEST POSITIF**, **ATTENTION** ou **TEST NÉGATIF** et de l'apparition de l'icône **IMPRIMER** sur l'écran.

Le port de l'embout buccal s'illumine :

- ROUGE - lorsque le résultat du test dépasse le taux d'alcoolémie légal
- ORANGE - lorsque le résultat du test se trouve compris dans une fourchette d'avertissement
- VERT - lorsque le résultat du test est en dessous de du seuil d'avertissement

Appuyez sur le bouton *principal* pour sélectionner l'icône **IMPRIMER**, ou attendez que le dispositif soit de nouveau en position **PRÊT POUR TEST**. Reportez-vous à la section « Imprimer » de ce manuel pour consulter les instructions d'impression.

Le résultat est conservé dans le journal. Reportez-vous à la section « Menu Historique » de ce manuel pour obtenir plus d'informations.

MENU HISTORIQUE



Sélectionnez l'icône **Historique** pour examiner les enregistrements du journal.

Chaque alcootest est enregistré sous un format numérique qui peut être interprété de la façon suivante :

Résultat du l'alcootest (exprimé par les termes **Positif**, **Attention**, ou **Négatif** lors d'un test passif)

Date	Heure	Résultat
13.06.04	11:35 AM	Passif Positif
13.06.04	11:35 AM	Passif Positif
13.06.04	11:34 AM	Passif Positif
13.06.04	08:54 AM	Passif Positif
13.06.04	08:53 AM	Passif Positif
13.06.04	03:40 PM	0.00 mg/dL
13.06.04	03:31 PM	0.00 mg/dL
13.06.04	02:46 PM	Passif Positif
13.06.04	02:45 PM	Passif Négatif
13.06.04	02:44 PM	Passif Positif

Navigation icons: Download, Previous, Print

RETOUR

REMARQUE : Les enregistrements en jaune indiquent que le test a été effectué à l'aide d'un dispositif en attente d'étalonnage. La mention **Non-vérifié** apparaîtra à l'impression.

Suivez les icônes indiquées ci-dessous pour naviguer dans le menu Historique.

Vous pouvez parcourir les options à l'aide des boutons de navigation et sélectionner avec le bouton *principal*. La sélection en cours est indiquée par un signe ► étroit situé à gauche de l'écran.

	Retour	Retourner au menu précédent.
	Imprimer	Reportez-vous à la section « Imprimer » de ce manuel.
	Page haut	Pour naviguer vers le haut dans le journal, d'une page à l'autre.
	Page bas	Pour naviguer vers le bas dans le journal, d'une page à l'autre.
	Enregistrement haut	Pour naviguer vers le haut dans le journal, d'un enregistrement à l'autre.
	Enregistrement bas	Pour naviguer vers le bas dans le journal, d'un enregistrement à l'autre.

MENU DE RÉGLAGE



Sélectionnez l'icône **Réglage** pour modifier les diverses options.

HEURE ET DATE



Sélectionnez l'icône **HEURE ET DATE** pour modifier les divers éléments de la date et de l'heure. Vous pouvez parcourir les options à l'aide des boutons de navigation et sélectionner avec le bouton *principal*.



Réglage heure. Les choix **24 heures** et **RETOUR** sont affichés. Le choix en cours est indiqué par un indicateur ►. Appuyez sur le bouton de navigation pour naviguer vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur le bouton *principal* pour sélectionner.

Heure. La valeur des heures clignote. Utilisez les boutons de navigation pour augmenter ou réduire la valeur. Appuyez sur le bouton *principal* pour confirmer et passer à la valeur des minutes. Renouvelez ces étapes pour régler la valeur des minutes et confirmer, ce qui a pour effet de retourner au menu précédent.

Format d'heure. Le format d'heure clignote. Sélectionnez **12 heures** ou **24 heures** à l'aide des boutons de navigation, puis appuyez sur le bouton principal pour confirmer. La valeur **AM/PM** clignote lorsque le format **12 heures** est sélectionné. Sélectionnez **AM** ou **PM** à l'aide des boutons de navigation, puis appuyez sur le bouton *principal* pour confirmer. Pour retourner au menu HEURE ET DATE, sélectionnez **RETOUR** en appuyant sur le bouton *principal*.



Réglage date. Les choix jour, mois, année et **RETOUR** sont affichés. Le choix en cours est indiqué par un indicateur ►. Utilisez les boutons de navigation pour naviguer vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur le bouton *principal* pour sélectionner.

Jour. La valeur des jours clignote. Utilisez les boutons de navigation pour augmenter ou réduire la valeur. Appuyez sur le bouton *principal* pour confirmer.

Mois. La valeur des mois clignote. Utilisez les boutons de navigation pour augmenter ou réduire la valeur. Appuyez sur le bouton *principal* pour confirmer.

Année. La valeur des années clignote. Utilisez les boutons de navigation pour augmenter ou réduire la valeur. Appuyez sur le bouton *principal* pour confirmer.

Format. Le format de date clignote. Utilisez les boutons de navigation pour modifier le format dans lequel la date s'affiche. Appuyez sur le bouton *principal* pour confirmer.



Retour. Vous permet de retourner au menu Réglage.

VOLUME



Sélectionnez l'icône **VOLUME** pour modifier les divers éléments relatifs au volume du haut-parleur. Vous pouvez parcourir les options à l'aide des boutons de navigation et sélectionner avec le bouton *principal*.



Bouton son. Un bip sonore est émis par défaut lorsque vous appuyez sur chaque bouton. Appuyez sur le bouton *principal* pour sélectionner **Son Bouton OFF** ou **Son Bouton ON**.



Augmenter le son. Appuyez sur le bouton *principal* pour augmenter le volume.



Baisser le son. Appuyez sur le bouton *principal* pour réduire le volume.



Retour. Vous permet de retourner au menu Réglage.

LUMINOSITÉ



Pour éclaircir ou assombrir l'écran, sélectionnez l'icône **LUMINOSITÉ**. Vous pouvez parcourir les options à l'aide des boutons de navigation et sélectionner avec le bouton *principal*.



Appuyez sur le bouton *principal* pour augmenter la luminosité de l'écran.



Appuyez sur le bouton *principal* pour augmenter la luminosité de l'écran.



Retour. Vous permet de retourner au menu Réglage.

LANGUE



Appuyez sur les boutons de navigation pour naviguer vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur le bouton *principal* pour sélectionner et sauvegarder. L'écran retourne au menu Réglage.

CONFIGURATION DU DISPOSITIF



Le choix en cours est indiqué par un indicateur ►. Utilisez les boutons de navigation pour naviguer vers le haut et vers le bas parmi les choix affichés. Ce menu contient uniquement des informations et il est utile en cas de dépannage par des revendeurs agréés. Il indique plusieurs paramètres par défaut :

- Code pays
- Version des caractères d'impression
- Version du firmware
- Version du matériel
- Numéro de série PCB
- Numéro de série de l'unité
- Unité de mesure
- Limite d'avertissement
- Limite positive

Pour retourner au menu principal, appuyez sur le bouton *principal*.

APPAIRAGE BLUETOOTH



Cette section vous permet de connecter l'éthylotest ALERT J5 à une imprimante Bluetooth. Reportez-vous à la section « Imprimer » de ce manuel pour obtenir plus d'informations.

RESTAURATION APPAREIL



Pour restaurer la configuration par défaut du volume, de la luminosité et de la langue, appuyez sur le bouton *principal*.

MENU DIAGNOSTIQUE



Les choix Diagnostique, Avancé et Retour sont affichées. Le choix en cours est indiqué par un indicateur ►. Utilisez les boutons de navigation pour naviguer vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur le bouton *principal* pour sélectionner.

DIAGNOSTIQUES

Test des principaux composants de l'unité. Le choix en cours est indiqué par un indicateur ►. Utilisez les boutons de navigation pour parcourir les icônes situées vers le bas et utilisez le bouton *principal* pour sélectionner.

POMPE. La pompe est activée une fois que la tension de charge nécessaire est atteinte. Les résultats du test sont exprimés par les termes **TEST NÉGATIF** ou **TEST POSITIF**. Appuyez sur le bouton *principal* pour retourner au menu précédent.

DEL. Le port DEL de l'embout buccal est testé dans toutes les couleurs disponibles (vert, orange et rouge) pour permettre de procéder à une vérification visuelle. Les résultats du test sont exprimés par les termes **TEST NÉGATIF** ou **TEST POSITIF**. Appuyez sur le bouton *principal* pour retourner au menu précédent.

HAUT-PARLEUR. Tous les signaux sonores du haut-parleur sont testés. Les résultats du test sont exprimés par les termes **TEST NÉGATIF** ou **TEST POSITIF**. Appuyez sur le bouton *principal* pour retourner au menu précédent.

BLUETOOTH. Le module Bluetooth est testé. Les résultats du test sont exprimés par les termes **TEST NÉGATIF** ou **TEST POSITIF**. Appuyez sur le bouton *principal* pour retourner au menu précédent.

RÉS. CHAUFFANTE CAPTEUR. Le chauffage du capteur est testé en contrôlant sa capacité à atteindre une température donnée en 20 secondes. Les résultats du test sont exprimés par les termes **TEST NÉGATIF** ou **TEST POSITIF**. Appuyez sur le bouton *principal* pour retourner au menu précédent.

REMARQUE : *Pour tester le chauffage du capteur, l'unité doit être branchée à un adaptateur secteur.*

RÉS. CHAUFFANTE TUBE. Le tube d'entrée d'air est testé en contrôlant sa capacité à atteindre une température donnée en 20 secondes. Les résultats du test sont exprimés par les termes **TEST NÉGATIF** ou **TEST POSITIF**. Appuyez sur le bouton principal pour retourner au menu précédent.

AVANCÉ

Ce menu est protégé par mot de passe. Seul un technicien qualifié d'ACS peut effectuer ces manipulations.

TÉMOIN DE CHARGEMENT DES PILES

L'icône de **Chargement des piles** est affichée dans le coin en haut à gauche.

Lorsque l'icône **Chargement des piles** clignote, celles-ci doivent être remplacées. Si cela n'est pas effectué, l'unité peut s'éteindre de manière inopinée.

REMARQUE : L'icône de Chargement des piles est remplacée par une icône USB lorsque l'unité est branchée dans un véhicule à l'aide d'un adaptateur secteur.

ÉTEINDRE L'ETHYLOTEST

L'éthylotest ALERT J5 s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité. Appuyez sur le bouton principal et maintenez-le enfoncé ou sélectionnez l'icône ÉTEINDRE pour éteindre l'éthylotest ALERT J5.

IMPRIMER

IMPRIMER VIA BLUETOOTH

L'imprimante Bluetooth fournie est déjà connectée par défaut à l'ALERT J5. Suivez cette procédure pour connecter l'éthylotest et l'imprimante au cas où l'un d'eux nécessite un remplacement sur le terrain.

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux de la batterie s'allume et que l'imprimante se mette en marche. Si l'imprimante ne se met pas en marche, il se peut que la batterie doive être remplacée.
2. Dans le menu principal, naviguez pour atteindre l'icône **Réglage** en vous servant des boutons de navigation. Sélectionnez l'icône **Appairage Bluetooth** en appuyant sur le bouton *principal*.
3. Le choix en cours est indiqué par un indicateur ►. Utilisez les boutons de navigation pour naviguer vers le haut et vers le bas parmi les choix affichés. Sélectionnez **AJOUTER APPAREIL** en appuyant sur le bouton *principal*. La liste se remplit en quelques secondes.
4. Les dispositifs Bluetooth se trouvant dans un rayon de 10 mètres apparaissent. Sélectionnez l'imprimante à l'aide du bouton *principal* et saisissez le mot de passe (contactez ACS).

REMARQUE : Le processus de connexion d'une imprimante ne s'effectue qu'une seule fois.

IMPRIMER VIA CÂBLE USB

L'imprimante USB comporte un câble USB. Ce câble sert à connecter le port USB de l'unité à celui de l'imprimante. Aucune manipulation supplémentaire n'est requise pour effectuer la connexion.

TRAVAUX D'IMPRESSION

L'icône **Imprimer** apparaît après qu'un échantillon d'haleine ait été produit, ainsi que dans le menu Historique afin de permettre l'impression des enregistrements antérieurs.

REMARQUE : Assurez-vous que l'imprimante est en marche et que le rouleau de papier est en place avant de continuer.

Appuyez sur le bouton *principal* pour afficher les options d'impression : Bluetooth ou USB. Vous pouvez parcourir les options à l'aide des boutons de navigation et sélectionner avec le bouton *principal* . Les résultats sont automatiquement imprimés après la sélection.

Reportez-vous à la section « Imprimer » de ce manuel pour obtenir plus d'informations.


INSERTION DE LA BATTERIE

1. Soulevez la languette située à l'arrière de l'imprimante afin de retirer le couvercle arrière et de découvrir le compartiment de la batterie.
2. Alignez les bornes électriques et poussez la batterie dans le compartiment.
3. Remettez le couvercle en place.

REMARQUE : Retirez la batterie lorsque l'imprimante n'est pas utilisée afin de préserver sa durée de vie. Laissez-la se décharger complètement avant de la recharger.

PLACEMENT DU ROULEAU DE PAPIER

1. Ouvrez la partie supérieure de l'imprimante en poussant vers le haut des deux côtés.
2. Placez un nouveau rouleau de papier dans l'emplacement prévu à cet effet en éloignant l'alimentation du papier des boutons.
3. Fermez le couvercle de façon à ce qu'une longueur de papier de 2,5 cm dépasse d'en dessous.

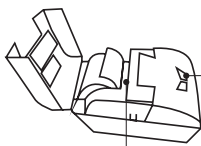

Appuyez sur le bouton Alimentation

Insérez le papier en dessous

4. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé afin d'allumer l'imprimante. Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le papier circule doucement à travers l'imprimante.

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

ÉTALONNAGE

Un étalonnage annuel est obligatoire afin de conserver une précision de résultats d'alcootests optimale. L'éthylotest ALERT J5 affiche automatiquement la mention **CALIBRAGE REQUIS** dans le menu principal 14 jours avant la date d'étalonnage prévue. Un étalonnage peut être effectué avec le simulateur éthylométrique ALCOSIM ou une bouteille d'alcool gazeux standard.

ÉLIMINATION EN FIN DE VIE UTILE

L'élimination de l'éthylotest ALERT J5 en fin de vie utile peut être effectuée des façons suivantes :

- Retourner l'éthylotest à votre revendeur à des fins d'élimination
- Contacter vos autorités locales de la gestion des déchets pour obtenir plus d'informations sur les méthodes d'élimination adéquates à suivre
- Demander à un prestataire d'élimination de déchets qualifié d'éliminer l'éthylotest

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

Pour obtenir les pièces suivantes, contactez votre revendeur :

95-000145 Embouts buccaux (sac de 25)

59-200032 Rouleau de papier pour imprimante

13-001107 Cable allume cigare

19-000028 Imprimante

INDEX

- A**
Adaptateur secteur, 3
Alcootest, 5, 6
- B**
Batterie, 3, 4, 15
- C**
Calibrage, 19
Capteur, 1
Chauffage du capteur, 14
Code pays, 13
Concentration d'alcool dans l'haleine, 4
- D**
Date & heure, 9
Débit d'air, 5
DEL, 14
Dépannage, 19
Diagnostic, 14
- E**
Échantillon d'haleine, 5
Élimination, 19
Embout buccal, 5, 6
Enregistrement bas, 9
Enregistrement haut, 9
Entretien, 19
Éteindre, 15
- F**
Format d'heure, 10
Fourchette d'avertissement, 6
- G**
Garantie, 1, 2
Grille d'échappement, 1, 6
- H**
Haut-parleur, 14
Horloge, 10
- I**
Imprimer, 6, 16
- L**
Langue, 12
Limite légale, 6
Limite réussite, 13
Luminosité, 12
- M**
Menu historique, 8
Menu principal, 5
Messages d'erreur, 4
- N**
Numéro de série de l'unité, 13
Numéro de série PCB, 13

P

Page bas, 9
Page haut, 9
Pompe, 14

R

Réglage, 5, 9
Réglage d'appareil, 13
Rés. Chauffante tube, 15
Restauration appareil, 13

S

Signaux analogiques, 15
Son du bouton, 11

T

Température ambiante, 1
Température appareil, 15
Test passif, 6

V

Version du firmware, 13
Volume, 11

