

AFDRUKBEWERKINGEN

Het **Printen**-pictogram verschijnt na het nemen van een ademtest, evenals in het **Geschiedenis** log om het afdrukken van vroegere resultaten mogelijk te maken.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld voordat u verder gaat.

Druk op de hoofdknop om de afdrukmogelijkheden weer te geven: Bluetooth of USB. Schakel tussen de opties door op de navigatietoetsen te drukken en selecteer de optie met de hoofdknop. De resultaten worden automatisch afgedrukt na selectie.

DE BATTERIJ VERVANGEN

De tester vereist twee AA-alkalinebatterijen om te werken. Om ze te plaatsen, schakel de tester uit en verwijder de achterklep door op beide zijden te duwen en op te tillen.

© 2014 Alcohol Countermeasure Systems

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALERT en de **"Molly"** zijn handelsmerken van Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. en worden gebruikt onder licentie. Alcohol Countermeasure Systems is de handelsstijl van Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.



QG-BE-DUT-60-000670-A
© 2014

ALERT™ J5

ALCOHOL ADEMTESTER



Snelle startgids




Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

info@acs-corp.com
acs-corp.com


J5 DIAGRAM

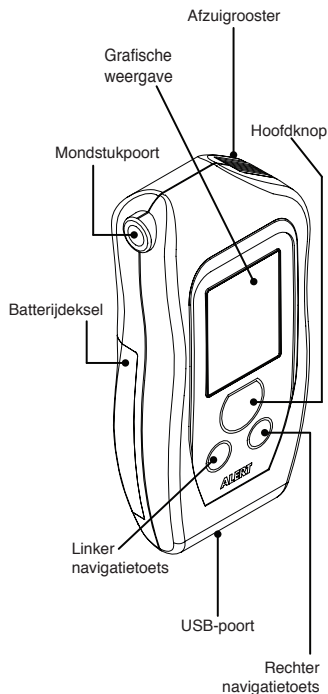

De ALERT J5 alcoholtester is gemakkelijk te gebruiken. Het meet het ademalcoholgehalte (AAG) dat in directe verhouding is met het bloedalcoholgehalte (BAG). Het resultaat wordt afgelezen op het display.

VEILIGHEID EN VOORZORGSAATREGELEN

- Gebruik de ALERT J5 tester enkel waarvoor het bedoeld is
- Blaas geen rook of spuw niet in het mondstuk, dit kan de sensor beschadigen
- Gebruik altijd een proper mondstuk om in de tester te blazen
- Bedek het afzuigrooster niet (rechter bovenkant van de tester) tijdens de ademtest
- Gebruik de tester niet bij extreme hitte of koude en vermijd blootstelling aan direct zonlicht voor langere tijd
- Gebruik de tester in een omgevingstemperatuur van -20 tot 65 °C
- Gebruik de adapter voorzien voor omgevingstemperaturen lager dan 10 °C
- Gebruik alleen AA-alkalinebatterijen
- Houd magneten of radiofrequentie (RF)-apparaten uit de buurt van de tester om de kans op elektromagnetische interferentie te minimaliseren
- Wacht 10 minuten na het eten, drinken of roken voor het verstrekken van een ademtest
- Het drinken van alcohol en het eten van voedingsmiddelen met alcohol zal resulteren in een waarschuwing, zoals: medicijnen, muntjes, roken, het gebruik van mondwater of mondspray
- Spuit geen luchtverfrissers, desinfecterende middelen, cologne of parfum voor de test, deze kunnen ook alcohol bevatten

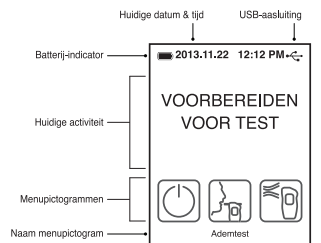

	Ademtest	Een test doen met een mondstuk.
	Passieve Test	Een test van de omgeving doen.
	Geschiedenis	Het overzicht bekijken met een afdrukoptie.
	Instellingen	Tijd / datum, taal, volume, helderheid en Bluetooth-koppelingen.
	Problemen oplossen	Foutcodes, diagnostiek en geavanceerde opties.
	Uitschakelen	Om het apparaat uit te schakelen.

ADEMTEST

1. Selecteer het pictogram **Ademtest** om een ademtest met mondstuk uit te voeren. Gebruik altijd een proper mondstuk om een nauwkeurige test te garanderen.
2. Wacht totdat **VOORBEREIDEN VOOR TEST** wordt weergegeven, gevolgd door **KLAAR**.
3. Blaas in het mondstuk. U hoort een continue toon die een correcte ademstroom aangeeft. Blijf blazen totdat de toon stopt. Een toonstoring met weergave van **AFBREKEN** geeft aan dat geen correcte ademtest werd verschaft. Volg de aanwijzingen op het scherm voor het uitvoeren van een nieuwe test.
4. Wacht tot **AAN HET ANALYSEREN** wordt weergegeven gedurende enkele seconden, gevolgd door het numerieke AAG-resultaat en het **Printen**-pictogram. De mondstukpoort brandt overeenkomstig.

PASSIEVE TEST

1. Selecteer het pictogram **Passieve Test** om een ademtest zonder mondstuk uit te voeren.
2. Wacht totdat **VOORBEREIDEN VOOR TEST** wordt weergegeven, gevolgd door **KLAAR**.
3. Plaats uw mond op 3 cm van het afzuigrooster, adem gedurende 5 seconden uit en druk op de hoofdknop om een ademtest te nemen.
4. Wacht tot **AAN HET ANALYSEREN** gedurende enkele seconden wordt weergegeven op het scherm, gevolgd door **DOORSTAAN, WAARSCHUWING** of **MISLUKT** en het **Printen**-pictogram.