

DRUKOWANIE

Po pobraniu próbki wydychanego powietrza pojawi się ikona **Drukuj** oraz w menu **Historia**, aby umożliwić drukowanie ostatnich zapisów.

UWAGA: Aby drukować upewnij się, że drukarka jest włączona.

Nacisnąć przycisk główny, aby wyświetlić opcje drukowania: Bluetooth lub USB. Przełączać pomiędzy opcjami za pomocą przycisków nawigacyjnych i wybrać opcję za pomocą przycisku głównego. Po wybraniu, wyniki będą drukowane automatycznie.

WYMIANA BATERII

Aby możliwe było działanie alkomatu, należy umieścić w nim dwie baterie typu AA. Aby włożyć baterie, należy wyłączyć alkomat i zdjąć tylną pokrywę, naciskając na nią po obu stronach i podnosząc ją do góry.

© 2014 Alcohol Countermeasure Systems

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALERT e o logotipo da ACS "the Molly" są znakami towarowymi firmy Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. v i zostały wykorzystane zgodnie z udzieloną licencją. Alcohol Countermeasure Systems stanowi nazwę skróconą firmy Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.



QG-POL-60-000673-A
© 2014

ALERT™ J5

A L K O M A T




Skrócona instrukcja
obsługi

Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

info@acs-corp.com
acs-corp.com

J5 SCHEMAT

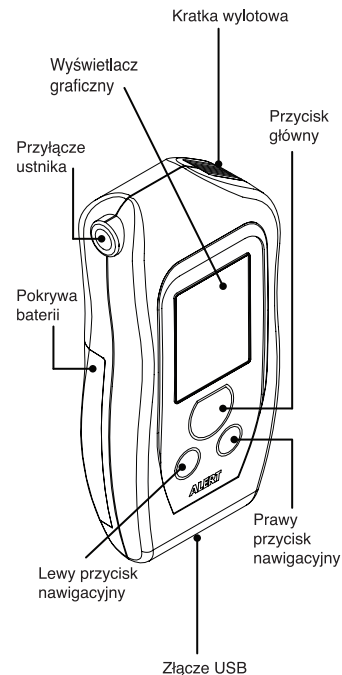

Alkomat ALERT J5 jest prosty w użyciu. Mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu, którego ilość jest wprost proporcjonalna do stężenia alkoholu we krwi. Odczyt jest wyświetlany na ekranie wyświetlacza.

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Alkomat ALERT J5 można stosować wyłącznie do celu, do jakiego został przeznaczony
- Zabrania się wprowadzania dymu do ustnika lub płucia do niego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie czujnika
- Do dmuchania do alkomatu należy zawsze korzystać z nowego ustnika
- Podczas dostarczania próbki wydychanego powietrza nie przykrywać kratki wylotowej umieszczonej w prawym górnym rogu alkomatu
- Nie przechowywać alkomatu w skrajnych temperaturach oraz unikać wystawiania go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas
- Korzystać z alkomatu w temperaturze od -20 °C do 65 °C
- Używać zasilacza sieciowego przewidzianego do stosowania w temperaturze otoczenia poniżej 10 °C
- Używać tylko baterii alkalicznych AA
- Aby ograniczyć do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych, nie zbliżać do alkomatu magnesów i urządzeń radiowych
- Przed dostarczeniem próbki wydychanego powietrza odczekać 10 minut od momentu spożycia napojów, jedzenia lub wypalenia papierosa

- Spożywanie napojów alkoholowych, pokarmów zawierających alkohol oraz przyjmowanie leków, kropli mentolowych, palenie papierosów, używanie płynu lub aerozolu do płukania jamy ustnej spowoduje uzyskanie wyniku ostrzegającego testu
- Nie rozpryskiwać w pojeździe odświeżaczy powietrza, środków dezynfekujących, wód kolońskich lub perfum bezpośrednio przed badaniem, ponieważ substancje te mogą także zawierać alkohol



	Test oddechu	Aby wykonać test przy użyciu ustnika.
	Test pasywny	Aby wykonać test otaczającego środowiska.
	Historia	Aby przejrzeć dziennik przy pomocy opcji drukowania.
	Ustawienia	Czas / data, język, głośność, jasność i parowanie Bluetooth.
	Rozwiązywanie problemów	Kody błędów, diagnostyka i opcje zaawansowane.
	Wyłączenie	Aby wyłączyć urządzenie.

TEST ODDECHU

- Wybrać ikonę **Test oddechu**, aby wykonać test badanie wydychanego powietrza przy użyciu ustnika. W celu uzyskania dokładnej próbki wydychanego powietrza zawsze używaj nowego ustnika.
- Odczekać, aż wyświetli się komunikat **PRZYGOTOWANIE DO TESTU**, a następnie **GOTOWE**.
- Wdmuchać powietrze do ustnika. Prawidłowy przepływ powietrza zostanie potwierdzony ciągłym sygnałem dźwiękowym. Wdmuchiwać powietrze aż do momentu wyłączenia się sygnału dźwiękowego. Na ekranie wyświetlany jest komunikat **PORZUC** oraz słyszalny jest sygnał dźwiękowy informujące o nieudanej próbie pobrania próbki wydychanego powietrza. Postępować zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu w celu ponownego przeprowadzenia testu.
- Na ekranie przez kilka sekund wyświetlany jest komunikat **ANALIZA**, a następnie wyniki liczbowe zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz ikoną **Drukuj**. Przyłącze ustnika świeci odpowiednio do wyniku testu.

TEST PASYWNY

- Wybrać ikonę **Test pasywny**, aby wykonać test oddechowy bez użycia ustnika.
- Odczekać, aż wyświetli się komunikat **PRZYGOTOWANIE DO TESTU**, a następnie **GOTOWY**.
- Przyłożyć usta w odległości 3 cm od kratki wylotowej, wydychać powietrze przez 5 sekund, a następnie nacisnąć przycisk główny i pobrać próbkę wydychanego powietrza.
- Odczekać, aż przez kilka sekund wyświetli się komunikat **ANALIZA**, a następnie komunikat odnośnie przeprowadzonego testu **UDAŁO SIĘ, OSTRZEŻENIE** lub **NIE UDAŁO SIĘ** oraz ikoną **Drukuj**.