

## DRUKOWANIE

Po pobraniu próbki wydychanego powietrza pojawi się ikona **Drukuj** oraz w menu **Historia**, aby umożliwić drukowanie ostatnich zapisów.

**UWAGA:** Aby drukować upewnij się, że drukarka jest włączona.

Nacisnąć przycisk główny, aby wyświetlić opcję drukowania: Bluetooth lub USB. Przełączać pomiędzy opcjami za pomocą przycisków nawigacyjnych i wybrać opcję za pomocą przycisku głównego. Po wybraniu, wyniki będą drukowane automatycznie.

## WYMIANA BATERII

Aby możliwe było działanie alkomatu, należy umieścić w nim dwie baterie typu AA. Aby włożyć baterie, należy wyłączyć alkomat i zdjąć tylną pokrywę, naciskając na nią po obu stronach i podnosząc ją do góry.

© 2014 Alcohol Countermeasure Systems

**ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALERT** e o logotipo da ACS "the Molly" są znakami towarowymi firmy Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. v i zostały wykorzystane zgodnie z udzieloną licencją. Alcohol Countermeasure Systems stanowi nazwę skróconą firmy Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.



QG-POL-60-000673-A  
© 2014

# ALERT™ J5

A L K O M A T




Skrócona instrukcja  
obsługi



info@acs-corp.com  
acs-corp.com

## J5 SCHEMAT

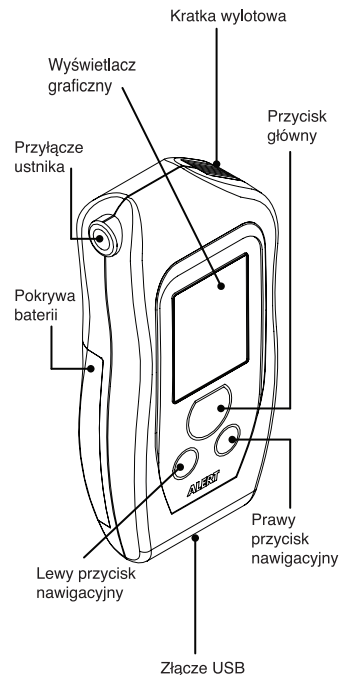


Alkomat ALERT J5 jest prosty w użyciu. Mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu, którego ilość jest wprost proporcjonalna do stężenia alkoholu we krwi. Odczyt jest wyświetlany na ekranie wyświetlacza.

## BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Alkomat ALERT J5 można stosować wyłącznie do celu, do jakiego został przeznaczony
- Zabrania się wprowadzania dymu do ustnika lub płucia do niego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie czujnika
- Do dmuchania do alkomatu należy zawsze korzystać z nowego ustnika
- Podczas dostarczania próbki wydychanego powietrza nie przykrywać kratki wylotowej umieszczonej w prawym górnym rogu alkomatu
- Nie przechowywać alkomatu w skrajnych temperaturach oraz unikać wystawiania go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas
- Korzystać z alkomatu w temperaturze od -20 °C do 65 °C
- Używać zasilacza sieciowego przewidzianego do stosowania w temperaturze otoczenia poniżej 10 °C
- Używać tylko baterii alkalicznych AA
- Aby ograniczyć do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych, nie zbliżać do alkomatu magnesów i urządzeń radiowych
- Przed dostarczeniem próbki wydychanego powietrza odczekać 10 minut od momentu spożycia napojów, jedzenia lub wypaleniu papierosa

- Spożywanie napojów alkoholowych, pokarmów zawierających alkohol oraz przyjmowanie leków, kropli mentolowych, palenie papierosów, używanie płynu lub aerozolu do płukania jamy ustnej spowoduje uzyskanie wyniku ostrzegającego testu
- Nie rozpryskiwać w pojeździe odświeżaczy powietrza, środków dezynfekujących, wódek kolońskich lub perfum bezpośrednio przed badaniem, ponieważ substancje te mogą także zawierać alkohol

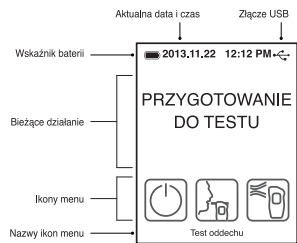

|                                                                                   |                         |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | Test oddechu            | Aby wykonać test przy użyciu ustnika.                        |
|  | Test pasywny            | Aby wykonać test otaczającego środowiska.                    |
|  | Historia                | Aby przejrzeć dziennik przy pomocy opcji drukowania.         |
|  | Ustawienia              | Czas / data, język, głośność, jasność i parowanie Bluetooth. |
|  | Rozwiązywanie problemów | Kody błędów, diagnostyka i opcje zaawansowane.               |
|  | Wyłączenie              | Aby wyłączyć urządzenie.                                     |

## TEST ODDECHU

1. Wybierz ikonę **Test oddechu**, aby wykonać test badanie wydychanego powietrza przy użyciu ustnika. W celu uzyskania dokładnej próbki wydychanego powietrza zawsze używaj nowego ustnika.
2. Odczekać, aż wyświetli się komunikat **PRZYGOTOWANIE DO TESTU**, a następnie **GOTOWE**.
3. Wdmuchać powietrze do ustnika. Prawidłowy przepływ powietrza zostanie potwierdzony ciągłym sygnałem dźwiękowym. Wdmuchiwać powietrze aż do momentu wyłączenia się sygnału dźwiękowego. Na ekranie wyświetlany jest komunikat **PORZUC** oraz słyszalny jest sygnał dźwiękowy informujące o nieudanej próbie pobrania próbki wydychanego powietrza. Postępować zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu w celu ponownego przeprowadzenia testu.
4. Na ekranie przez kilka sekund wyświetlany jest komunikat **ANALIZA**, a następnie wyniki liczbowe zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz ikoną **Drukuj**. Przyłączyć ustnika świeci odpowiednio do wyniku testu.

## TEST PASYWNY

1. Wybrać ikonę **Test pasywny**, aby wykonać test oddechowy bez użycia ustnika.
2. Odczekać, aż wyświetli się komunikat **PRZYGOTOWANIE DO TESTU**, a następnie **GOTOWY**.
3. Przyłożyć usta w odległości 3 cm od kratki wylotowej, wydychać powietrze przez 5 sekund, a następnie nacisnąć przycisk główny i pobrać próbkę wydychanego powietrza.
4. Odczekać, aż przez kilka sekund wyświetli się komunikat **ANALIZA**, a następnie komunikat ośnośnie przeprowadzonego testu **UDAŁO SIĘ**, **OSTRZEŻENIE** lub **NIE UDAŁO SIĘ** oraz ikoną **Drukuj**.