

## ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ

Значок **Печать** появляется по завершении подачи воздушной пробы. Вместе с ним появляется и меню **История**, позволяющее вывести на печать предыдущие результаты.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** *Перед продолжением следует удостовериться, что принтер включён.*

Нажатием главной кнопки вывести результат на принтер выбрав Bluetooth или USB. Выбор производится с помощью кнопок навигации и нажатием главной кнопки. После этого печать начнётся автоматически.

## ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Алкотестер работает на двух алкалиновых батареях размера AA. Для их установки следует выключить алкотестер и снять крышку батарейного отсека на задней панели протолкнув её пальцем вверх с обеих сторон.

© 2014 Alcohol Countermeasure Systems

### ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALERT а также "Molly"

являются торговыми марками Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc и используются по лицензии компании. Alcohol Countermeasure Systems является коммерческим обозначением of Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.



QG-RUS-60-000648-A  
© 2014

# ALERT™ J5

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛКОТЕСТЕР



Краткое руководство




## Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard  
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

info@acs-corp.com  
acs-corp.com

## J5 СХЕМА

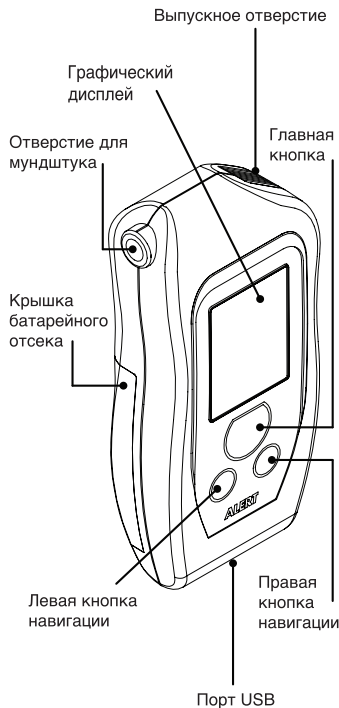

Профессиональный алкотестер ALERT J5 прост в применении. Прибор измеряет концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе, которая прямо пропорциональна концентрации алкоголя в крови. Результат измерения выводится на дисплей.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Алкотестер ALERT J5 следует применять только по прямому назначению
- Следует избегать попадания в мундштук табачного дыма или слюны: они могут вывести из строя сенсор
- При тестировании следует использовать новый мундштук
- При подаче воздушной пробы не перекрывайте выходное отверстие в верхней части алкотестера
- Избегайте хранения алкотестера в условиях крайне высоких или низких температур и воздействия на прибор прбора под воздействием прямых солнечных лучей в течение продолжительного периода времени
- Прибор следует применять при окружающей температуре от 0° до 65° C
- При окружающей температуре ниже 10° C следует пользоваться адаптером питания
- Применять только аккумуляторные батарейки AA
- Прибор должен находиться вне воздействия магнитных полей и радиопомех во избежание электромагнитных помех
- После приёма пищи и напитков следует выждать 10 минут перед проведением подачи воздушной пробы
- Потребление алкогольных напитков или продуктов питания а также приём лекарственных препаратов, ментоловых капель, содержащих алкоголь, курение

или применение ополаскивателей рта и спреев может вызвать повышенные результаты измерения

- Перед тестом не следует пользоваться освежителями воздуха, дезинфицирующими препаратами, пользоваться одеколоном или духами, поскольку они могут содержать алкоголь



|  |                |                                                                |
|--|----------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Тест выдоха    | Для тестирования с использованием мундштука.                   |
|  | Пассив.тест    | Для проверки окружающего воздуха.                              |
|  | История        | Для просмотра записей с возможностью вывода на печать.         |
|  | Настройки      | Время/дата, язык, громкость, яркость и сопряжение с Bluetooth. |
|  | Поиск неисправ | Коды ошибок, диагностика, дополнительные возможности           |
|  | Выключение     | Чтобы выключить прибор.                                        |

## ТЕСТ ВЫДОХА

- Для проверки выдыхаемого воздуха следует выбрать в меню значок **Тест выдоха**. Для точности измерений перед каждым тестированием всегда следует пользоваться новым мундштуком.
- Дождаться окончания стадии **ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ** и появления сообщения **ГОТОВ**.
- Продуть воздух в мундштук. Продувание сопровождается продолжительным звуковым сигналом, сообщаемом о поступлении воздушного потока, что необходимо для отбора достаточной воздушной пробы. В случае преждевременного прерывания появится сообщение **СБРОС**; при этом тестирование надо повторить следуя инструкциям, появляющимся на экране.
- По окончании продувания прибор производит анализ полученной воздушной пробы, о чём оповестит сообщение **АНАЛИЗ**, затем на экране появится цифровое значение концентрации алкоголя в выдохе и значок **Печать**. Отверстие для мундштука засветится.

## ПАССИВ.ТЕСТ

- Для проведения теста без применения мундштука следует выбрать значок **Пассивный тест**.
- Дождаться завершения стадии **ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ** и перехода прибора к стадии **ГОТОВ**.
- Поднести выпускное отверстие на расстояние 3 см от губ, продуть 5 секунд, после чего нажать главную кнопку для отбора воздушной пробы.
- По завершении стадии **АНАЛИЗ** появится сообщение **ПРОЙДЕН**, **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** или **НЕ ПРОЙДЕН**.