

4. Vänta tills **ANALYSERAR** visas i några sekunder, följt av den numeriska BAC resultatet och ikonen **Skriv**. Munstycksporten lyser följaktligen.

## PASSIVT PROV

1. Välj ikonen **Passivt Prov** för att utföra ett.
2. Vänta tills **FÖRBEREDER FÖR PROV** visas, följt av **REDO**.
3. Sätt munnen 3 cm ifrån utblåsgallret, andas ut i 5 sekunder och tryck på huvudknappen för att göra ett utandningsprov.
4. Vänta tills **ANALYSERAR** visas i några sekunder, följt av den numeriska BAC resultatet och ikonen **Skriv**. Munstycksporten lyser följaktligen.

## UTSKRIFT HANTERING

Ikonen **Skriv** visas efter att ett utandningsprov utförts, liksom i **Historik Meny** för att möjliggöra utskrift av tidigare loggar.

**OBS: Se till att skrivaren är på innan du fortsätter.**

Tryck på huvudknappen för att visa utskriftsalternativ: Blåtand eller USB. Växla mellan alternativen genom att trycka på navigeringsknapparna och välj alternativet med huvudknappen. Resultatet skrivs ut automatiskt efter val.

## BYTA BATTERI

Mätaren kräver två alkaliska AA-batterier för att fungera. För att byta i, stäng av mätaren och ta bort bakstycket genom att trycka på båda sidorna och lyfta upp det.

© 2014 Alcohol Countermeasure Systems

**ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALERT** och **"The Molly"** är varumärken tillhörande Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. och används under licens. Alcohol Countermeasure Systems är en affärsgren av Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.



QG-SWE-60-000653-A  
© 2014

# ALERT™ J5

BEVIS - ALKOMÄTARE



## Snabbguide

## CERTIFIERING

ALERT J5 bevis-alkomätare och andra alkoholmätande produkter av Alcohol Countermeasure Systems (ACS) uppfyller internationella standarder för funktion och säkerhet. För mer information, kontakta ACS.




## Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard  
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

info@acs-corp.com  
acs-corp.com


## J5 KOMPONENTER

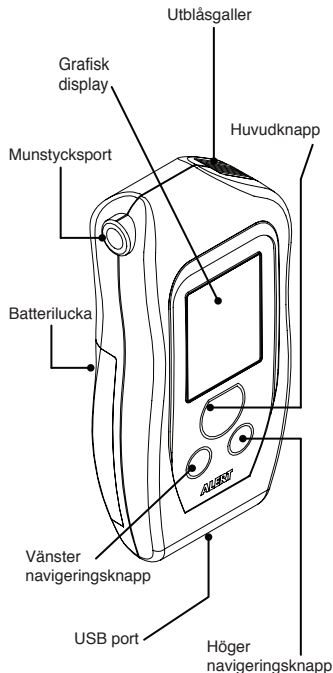

ALERT J5 bevis-alkomätare är enkel att använda. Den mäter alkoholkoncentration i utandningsluften (BrAC), vilket är i direkt proportion till alkoholkoncentration i blodet (BAC). Avläsningen visas på displayen.

## SÄKERHET OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Använd ALERT J5 alkomätare endast för sitt syfte
- Blås inte in rök eller spotta i munstycket: det kan förstöra sensorn
- Använd alltid ett rent munstycke när du bläser in i alkomätaren
- Täck inte utblåsgallret (höger översida på alkomätaren) medan utandningsprov utförs
- Förvara inte alkomätaren i extrem värme eller kyla och undvik att exponera i direkt solljus i längre perioder
- Använd alkomätaren inom temperaturområdet -20 till 65 °C
- Använd den medföljande strömadaptern för temperaturområde under 10 °C
- Använd endast AA alkaline batterier
- Håll magneter eller radiofrekventa (RF) enheter borta från alkomätaren för att minimera för potentiella elektromagnetiska störningar
- Vänta 10 minuter efter att du har druckit, ätit eller rökt innan utförande av utandningsprov
- Dricka alkohol och äta livsmedel som innehåller alkohol kommer att resultera i en varning, inklusive: läkemedel, mentoldroppar, rökning, användande av munvatten eller munspray
- Spraya inte luftrenare, desinfektionsmedel, cologne eller parfym innan ett prov då det också kan innehålla alkohol

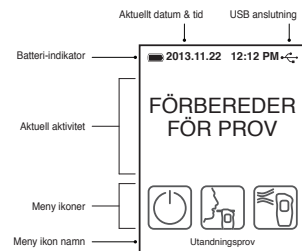

|  |                 |                                                           |
|--|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Utdandningsprov | Att göra ett prov med ett munstycke.                      |
|  | Passivt Prov    | Att göra ett prov av omgivande miljö.                     |
|  | Historik        | Att granska loggen med ett utskriftsalternativ.           |
|  | Inställningar   | Tid/datum, språk, volym, ljusstyrka och Blåtands-parning. |
|  | Felsökning      | Felkoder, diagnostik och avancerade alternativ.           |
|  | Avstängning     | Stänga av enheten.                                        |

## UTANDNINGSPROV

- Välj ikonen **Utdandningsprov** för att utföra ett utandningsprov med ett munstycke. Sätt alltid i ett rent munstycke för att försäkra om ett korrekt utandningsprov.
- Vänta tills **FÖRBEREDER FÖR PROV** visas, följt av **REDO**.
- Blås i munstycket. En kontinuerlig ton kan höras, indikerande korrekt luftflöde. Fortsätt blåsa tills ljudet tystnar. En felande ton med **AVBROTT** i displayen indikerar att ett korrekt utandningsprov inte utförts.