

4. Vänta tills **ANALYSERAR** visas i några sekunder, följt av den numeriska BAC resultatet och ikonen **Skriv**. Munstycksporten lyser följaktligen.

PASSIVT PROV

1. Välj ikonen **Passivt Prov** för att utföra ett.
2. Vänta tills **FÖRBEREDER FÖR PROV** visas, följt av **REDO**.
3. Sätt munnen 3 cm ifrån utblåsgallret, andas ut i 5 sekunder och tryck på huvudknappen för att göra ett utandningsprov.
4. Vänta tills **ANALYSERAR** visas i några sekunder, följt av den numeriska BAC resultatet och ikonen **Skriv**. Munstycksporten lyser följaktligen.

UTSKRIFT HANTERING

Ikonen **Skriv** visas efter att ett utandningsprov utförts, liksom i **Historik Meny** för att möjliggöra utskrift av tidigare loggar.

OBS: Se till att skrivaren är på innan du fortsätter.

Tryck på huvudknappen för att visa utskriftsalternativ: Blåtand eller USB. Växla mellan alternativen genom att trycka på navigeringsknapparna och välj alternativet med huvudknappen. Resultatet skrivs ut automatiskt efter val.

BYTA BATTERI

Mätaren kräver två alkaliska AA-batterier för att fungera. För att byta i, stäng av mätaren och ta bort bakstycket genom att trycka på båda sidorna och lyfta upp det.

© 2014 Alcohol Countermeasure Systems

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALERT och "The Molly"

är varumärken tillhörande Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. och används under licens. Alcohol Countermeasure Systems är en affärsgren av Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.



QG-SWE-60-000653-A
© 2014

ALERT™ J5

BEVIS - ALKOMÄTARE



Snabbguide

CERTIFIERING

ALERT J5 bevis-alkomätare och andra alkoholmätande produkter av Alcohol Countermeasure Systems (ACS) uppfyller internationella standarder för funktion och säkerhet. För mer information, kontakta ACS.




Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

info@acs-corp.com
acs-corp.com


J5 KOMPONENTER

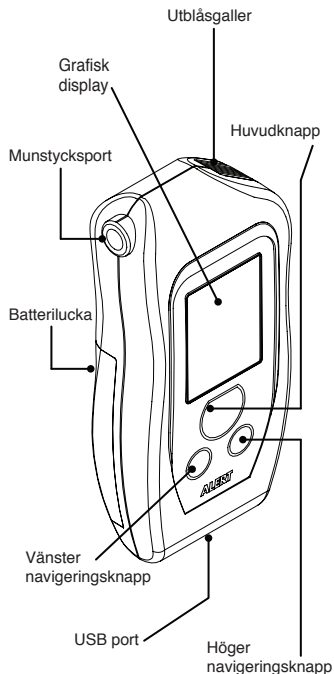

ALERT J5 bevis-alkomätare är enkel att använda. Den mäter alkoholkoncentration i utandningsluften (BrAC), vilket är i direkt proportion till alkoholkoncentration i blodet (BAC). Avläsningen visas på displayen.

SÄKERHET OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Använd ALERT J5 alkomätare endast för sitt syfte
- Blås inte in rök eller spotta i munstycket: det kan förstöra sensorn
- Använd alltid ett rent munstycke när du blåser in i alkomätaren
- Täck inte utblåsgallret (höger översida på alkomätaren) medan utandningsprov utförs
- Förvara inte alkomätaren i extrem värme eller kyla och undvik att exponera i direkt solljus i längre perioder
- Använd alkomätaren inom temperaturområdet -20 till 65 °C
- Använd den medföljande strömadaptern för temperaturområde under 10 °C
- Använd endast AA alkaline batterier
- Håll magneter eller radiofrekventa (RF) enheter borta från alkomätaren för att minimera för potentiella elektromagnetiska störningar
- Vänta 10 minuter efter att du har druckit, åtit eller rökt innan utförande av utandningsprov
- Dricka alkohol och äta livsmedel som innehåller alkohol kommer att resultera i en varning, inklusive: läkemedel, mentoldroppar, rökning, användande av munvatten eller munspray
- Spraya inte luftrenare, desinfektionsmedel, cologne eller parfym innan ett prov då det också kan innehålla alkohol

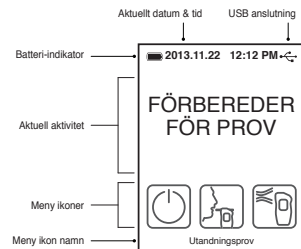

	Utandningsprov	Att göra ett prov med ett munstycke.
	Passivt Prov	Att göra ett prov av omgivande miljö.
	Historik	Att granska loggen med ett utskriftsalternativ.
	Inställningar	Tid/datum, språk, volym, ljusstyrka och Blåtands-parning.
	Felsökning	Felkoder, diagnostik och avancerade alternativ.
	Avstängning	Stänga av enheten.

UTANDNINGSPROV

1. Välj ikonen **Utandningsprov** för att utföra ett utandningsprov med ett munstycke. Sätt alltid i ett rent munstycke för att försäkra om ett korrekt utandningsprov.
2. Vänta tills **FÖRBEREDER FÖR PROV** visas, följt av **REDO**.
3. Blås i munstycket. En kontinuerlig ton kan höras, indikerande korrekt luftflöde. Fortsätt blåsa tills ljudet tystnar. En felande ton med **AVBROTT** i displayen indikerar att ett korrekt utandningsprov inte utförts.